

取扱説明書

KQ-9534

アジャスター 手すりレツバー専用

7F11627200A0

まえがき

このたびは、アジャスターをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。


この「取扱説明書」にはアジャスターを安全にお使いいただくための注意事項と組立方法などを記載しております。

- アジャスターをお使いになる前に、必ずこの「取扱説明書」および手すりレツバー（KQ-9532L・KQ-9532H：別売 以下、手すり）の「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全な取扱方法を理解してください。
- アジャスターを使用する方ばかりでなく、介護する方もこの「取扱説明書」をよくお読みください。
- この「取扱説明書」はお読みになった後も、いつでも見られる場所に保管してください。
- お買い上げの製品は、改良などにより、この「取扱説明書」の内容と一部異なる場合があります。
- 動作範囲・寸法・角度・質量などの数値の記載がある場合、その数値には多少の誤差が含まれます。特別なものを除きこの「取扱説明書」では、表示を見やすくするため、約・およそといった言葉を省略しております。
- ご不明点がありましたら、お買い上げの販売店または直接弊社までお問い合わせください。

使用目的


アジャスターは、手すりのベースプレートと地面とのすき間の、がたつきを解消することを目的に作られています。

仕様

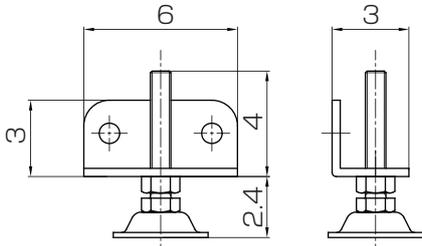
品名	アジャスター	
品番	KQ-9534	
適合品	KQ-9532L・KQ-9532H	
対応すき間 (cm)	6	
寸法 (cm)		
製品質量 (kg) (1 個当たり)	0.24	
主な材質	レベルアジャスター	ステンレス
	取付プレート	ステンレス
	保護キャップ	PVC
最大利用者体重 (kg)	100	

各部の名称と部品の確認

■ 開梱後、下記の部品がすべて揃っていること、破損していないことを確認してください。万一、部品の不足や破損があった場合には、販売店または直接弊社までご連絡ください。

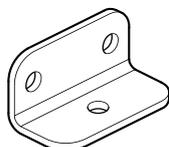

取付プレート×2

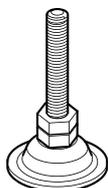

レベルアジャスター×2



保護キャップ×2



取扱説明書 (本書) × 1

品番	Q9543
製品質量 (kg)	0.24
梱包重量 (kg)	0.3
梱包サイズ (cm)	5 × 5 × 10

■ 使用工具

※付属されていません。
お客様でご用意ください。



スパナ (対辺 13mm)



六角レンチ (対辺 4mm)

安全上の注意<必ずお守りください>



この表示を無視して誤った取扱いをすると、死亡または重傷（骨折・圧迫・麻痺^{まひ}など）を負う可能性が想定される内容を示しています。

使用目的について

■ アジャスターと組合せて使用する手すりは、弊社が指定する適合品を使用してください

指定以外の製品や他社製品と組合せると、意図せぬすき間の発生や製品同士の接触、安定性の低下などにより、けがをしたり、アジャスターが破損・変形したりするおそれがあります。

点検・修理について

■ アジャスターは定期的に点検してください

- 使用の頻度や環境により、製品は摩耗・劣化します。定期的にながつきや各部のゆるみ、破損の有無などを点検してください。摩耗・劣化した状態で使い続けると、思わぬけがをするおそれがあります。
- 使用環境によっては、さびが発生するおそれがあります。

■ アジャスターが破損した場合は直ちに使用を中止してください

けがをするおそれがあります。破損した場合はすぐに使用を中止し、お買い上げの販売店またはパラテクノコールセンター（裏表紙参照）まで修理（交換）をご依頼ください。

■ お客様による修理・改造はしないでください

思わぬけがや破損の原因となります。



この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が軽傷（打撲・すり傷・切り傷など）を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

■ アジャスターの上に乗らないでください

ねじ部でけがをしたり、アジャスターが破損・変形したりするおそれがあります。

設置・保管上の注意<必ずお守りください>



設置後は、アジャスターが確実に固定されていること、アジャスターや手すりが安定していることを確認した上でご使用ください

手すりが倒れたり不安定になったりして、転落・転倒してけがをしたり、手すりやアジャスターが破損・変形したりするおそれがあります。


■長期保管の際は、以下の項目に注意してください

- 直射日光の当たる場所や、高温・多湿・低温・乾燥・ほこりの多い場所を避けてください。
※ 温度 - 10 ~ 50℃、湿度 30 ~ 90% RH の環境で保管してください。
- 取扱説明書は紛失しないよう、大切に保管してください。

取付方法


①取付プレートの高さ調節

手すりのベースプレートと地面とのすき間にあわせた向き・高さになるように、レベルアジャスターを取付プレートに取付けてください。

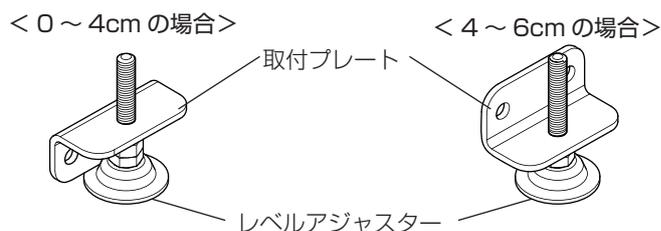


②アジャスターの取付け

手すりのベースプレート側面に取付けられている、ボルトを六角レンチ（対辺 4mm）で取外し、取外したボルトでアジャスターを取付け、六角レンチ（対辺 4mm）で締付けて固定してください。

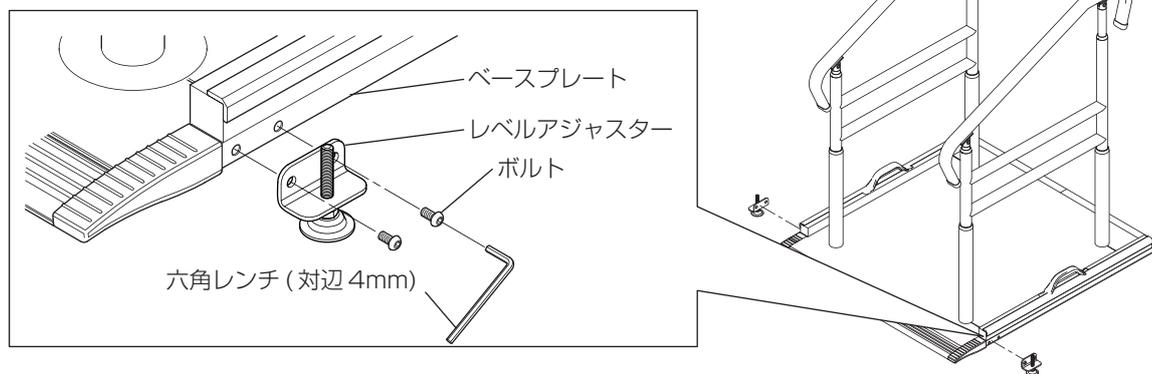


③取付プレートの固定

レベルアジャスターのナットをスパナ（対辺 13mm）で締付けて、取付プレートを固定してください。

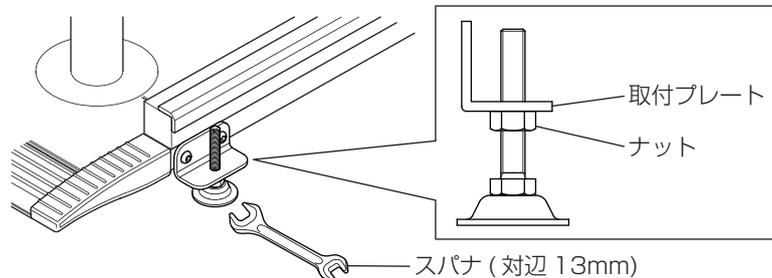

④保護キャップの取付け

レベルアジャスターのねじ部に、保護キャップを取付けてください。

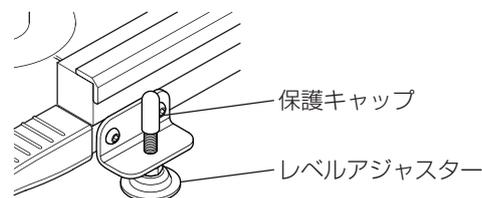

■分解方法

分解するときは、組立方法と逆の手順で行ってください。

点検

●アジャスターは組立て後に点検をし、また定期的に点検をしてください。使用頻度や環境により製品は摩耗劣化します。定期的に下記のチェックシートに記載されている点検項目をチェックして、異常がないことを確認してください。異常が認められた場合や詳しい点検をご希望される場合は、パラテクノコールセンター（下記参照）までお問い合わせください。

チェックシート

①アジャスターの確認

- ・アジャスターや手すりにがたつきはありませんか？
ない ある→取付方法参照
- ・保護キャップが外れていませんか？
外れていない 外れている→取付方法参照

②アジャスターの傷や変形

- ・アジャスターに傷や変形はありませんか？
ない ある→パラテクノコールセンター（下記参照）へ連絡

日常のお手入れ・アフターサービスについて

■汚れの落としかた

下記①～③の手順で行ってください。

- ①水で薄めた中性洗剤にひたした布を、よくしぼって拭いてください。
- ②水でひたした布をよくしぼって、残った洗剤分を拭き取ってください。
- ③乾いた布で残った水分を拭き取ってください。

■消毒のしかた

右記の消毒剤を、指定の濃度、消毒剤の取扱説明書などの指示に従ってご使用ください。

消毒剤	指定の濃度
消毒用エタノール	76.9～81.4%
塩化ベンザルコニウム（オスバンなど）	0.05～0.2%
塩化ベンゼトニウム（ハイアミンなど）	0.05～0.2%
グルコン酸クロルヘキシジン（ヒビテンなど）	0.05%
次亜塩素酸ナトリウム（ミルトンなど）	0.02～0.05%



オゾン殺菌器、オートクレーブ滅菌器などには対応できません。

注意

- 酸性洗剤、塩素系洗剤、アルカリ性洗剤、揮発性のもの（シンナー、ベンジン、ガソリンなど）やクレゾールは使用しないでください。変色・変質するおそれがあります。
- 中性洗剤を使用した場合は、その後水拭きをしてください。水拭きをしないと樹脂の部分が割れるおそれがあります。
- クレンザー、磨き粉などの粗い粒子を含んだ洗剤や、研磨剤入りのスポンジ、たわし、ブラシなどは使用しないでください。傷をつけるおそれがあります。
- 消毒剤を使用する場合は、指定以外の薬品を使用しないでください。破損・変質のおそれがあります。



■廃棄

廃棄の際は、「廃棄物の処理および清掃に関する法律」および各自治体の規則に従ってください。

■アフターサービスについてご不明な場合は

お買い上げの販売店、またはパラテクノコールセンターまでお問い合わせください。

パラテクノコールセンター ☎ 0120-54-8639

受付時間：平日 8:00～19:00 / 土・日・祝日 9:00～17:20（年始は休業いたします）

【パラテクノ株式会社について】 弊社製品の修理や保守点検などの各種サービスを実施する会社です。

<パラマウントベッド株式会社>

本社 〒136-8670 東京都江東区東砂2丁目14番5号 ☎(03)3648-1111(代)
東京支店 〒136-8670 東京都江東区東砂2丁目14番5号 ☎(03)3648-1171(代)
札幌支店 〒060-0062 札幌市中央区南2条西13丁目318番地11 ☎(011)271-1181(代)
仙台支店 〒984-0015 仙台市若林区卸町2丁目3番地の3 ☎(022)239-5211(代)
さいたま支店 〒338-0001 さいたま市中央区上落合9丁目4番7号 ☎(048)852-0707(代)
横浜支店 〒194-0004 東京都町田市鶴間5丁目3番33号 ☎(042)795-8800(代)
名古屋支店 〒461-0001 名古屋市東区泉1丁目20番17号 ☎(052)963-0600(代)
大阪支店 〒550-0001 大阪市西区土佐堀2丁目3番33号 ☎(06)6443-8791(代)
広島支店 〒733-0011 広島市西区横川町3丁目8番5号 ☎(082)293-1311(代)
福岡支店 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3丁目14番20号 ☎(092)461-1131(代)