

## 取扱説明書


KF-832LA, LB, LD, LF, SA, SB

KF-833LA, LB, LD, LF, SA, SB

# オーバーベッドテーブル

保証書付

7F05405900A7

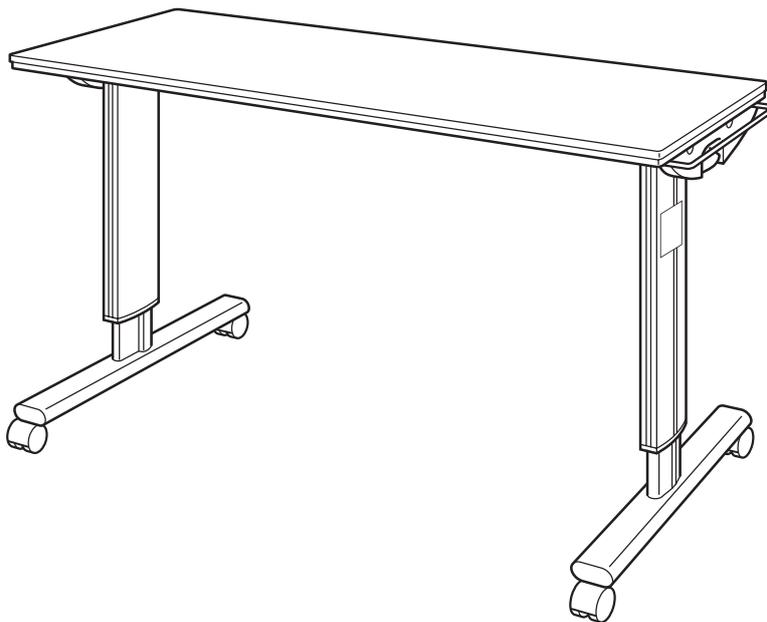

### まえがき

このたびは、オーバーベッドテーブル（以下、テーブル）をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

この「取扱説明書」には、テーブルを安全にお使いいただくための注意事項と使用方法などを記載しています。

- テーブルをお使いになる前に、必ずこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全な取扱方法を理解してください。
- テーブルを使用する方ばかりでなく、付き添いの方や介護する方もこの「取扱説明書」をよくお読みください。
- この「取扱説明書」はお読みになった後も、いつでも見られる場所に保管してください。
- お買い上げの製品は、改良などにより、この「取扱説明書」の内容と一部異なる場合があります。
- 動作範囲・寸法・角度・質量などの数値の記載がある場合、その数値には多少の誤差が含まれます。特別なものを除きこの「取扱説明書」では、表示を見やすくするため、約・およそといった言葉を省略しております。
- ご不明な点がございましたら、お買い上げの販売店または直接弊社までお問い合わせください。

# もくじ

---

<b>1</b> 使用目的 .....	2
<b>2</b> 特長 .....	2
<b>3</b> 各部の名称 .....	2
<b>4</b> 安全に使用するための注意事項 .....	3～6
<b>5</b> 部品の確認 .....	7
<b>6</b> 組立方法 .....	8
<b>7</b> 使用方法 .....	9～10
<b>8</b> 定期点検 .....	11
<b>9</b> 日常のお手入れ・長期保管・廃棄について.....	12
<b>10</b> 仕様 .....	13
<b>11</b> アフターサービスについて .....	14

# 1 使用目的

■このテーブルは、ベッド上で食事や軽作業をする際に使用することを目的に作られています。


# 2 特長

■このテーブルは移動式です。


■テーブルの高さは、使用される方にあわせて無段階の調節が可能です。

# 3 各部の名称

■KF-832LA, LB, LD, LF, SA, SB

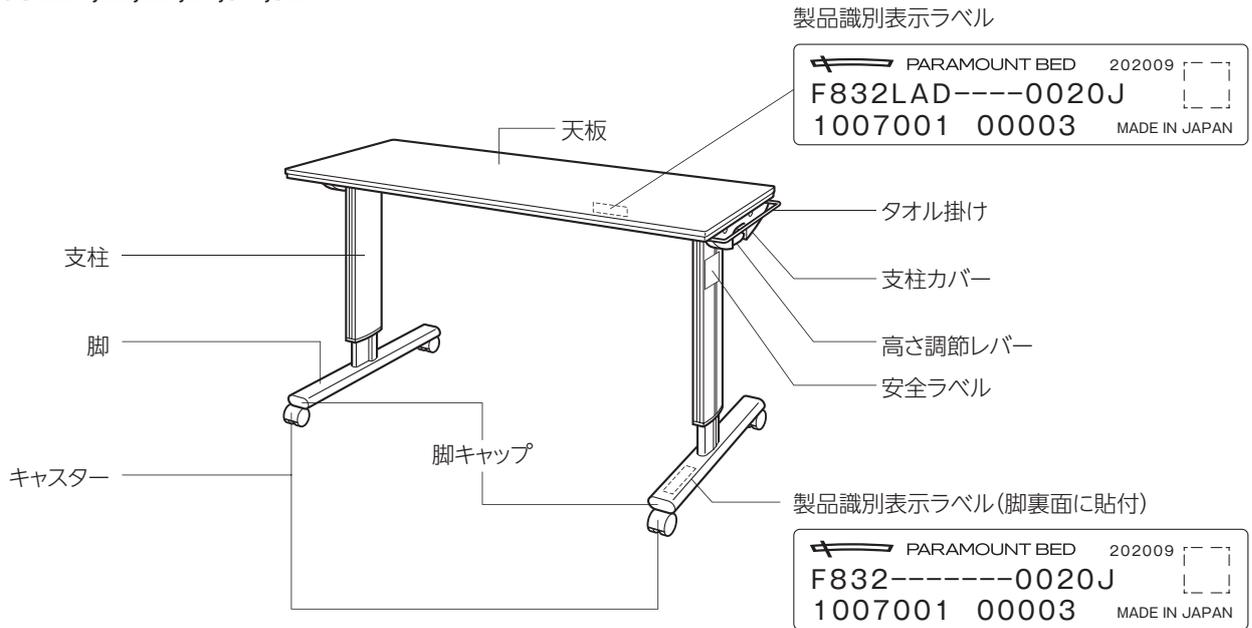

■KF-833LA, LB, LD, LF, SA, SB (テーブル移動ロック機構付き)

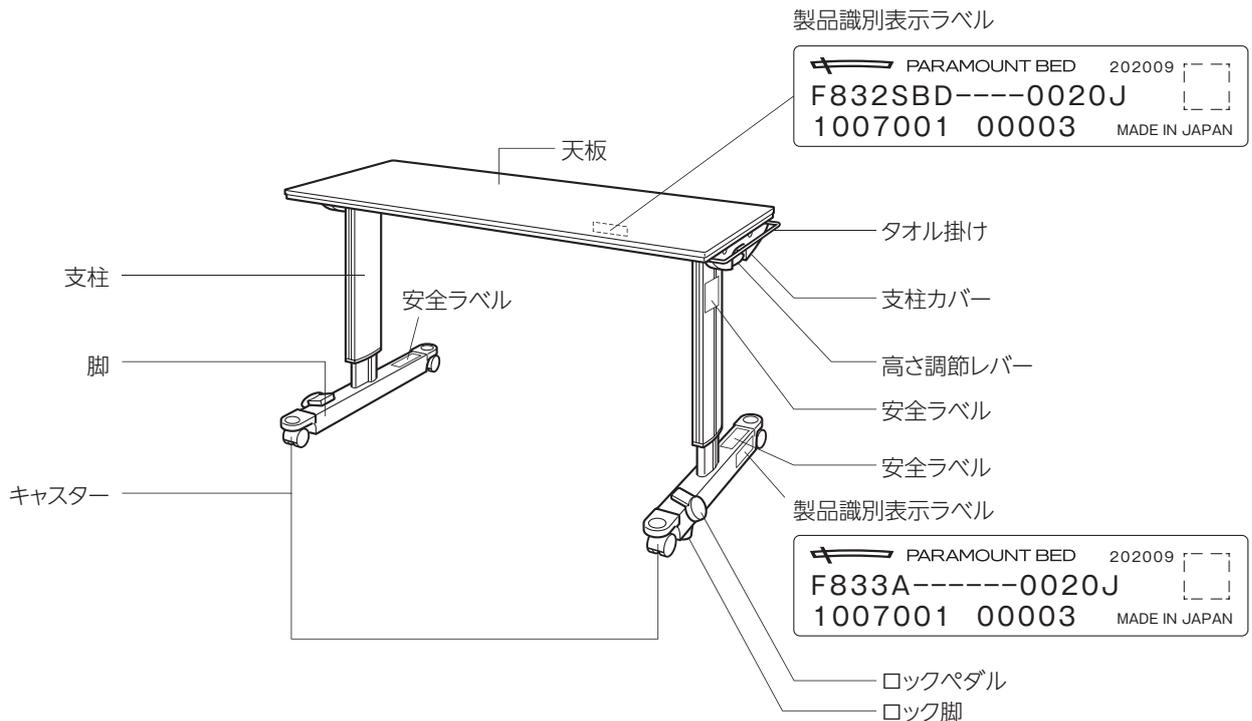

●タオル掛け、高さ調節レバー、ロックペダルは左右両側にあります。

## 4 安全に使用するための注意事項

■必ずご使用の前にこの「安全に使用するための注意事項」をよくお読みいただき、正しくお使いください。

●ここに示した注意事項は製品を安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、危害や損害の大きさと切迫の程度に応じて「△警告」と「△注意」の二つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。


 <b>警告</b>	この表示を無視して誤った取扱いをすると、死亡または重傷（骨折・圧迫・ <sup>まひ</sup> 麻痺など）を負う可能性が想定される内容を示しています。
 <b>注意</b>	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が軽傷（打撲・すり傷・切り傷など）を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

※取扱説明書をお読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

### 【安全ラベルについて】

- 注意事項の中で、テーブルをお使いになる方に特に注意していただきたい項目をラベルにして、支柱側面・脚に貼ってあります。はがしたり傷つけたりしないでください。
- 安全ラベルが傷ついたり、はがれたりした場合には販売店から新しい安全ラベルを取り寄せ、貼り直してください。

※イラストは KF-833LA, LB, LD, LF, SA, SB です。

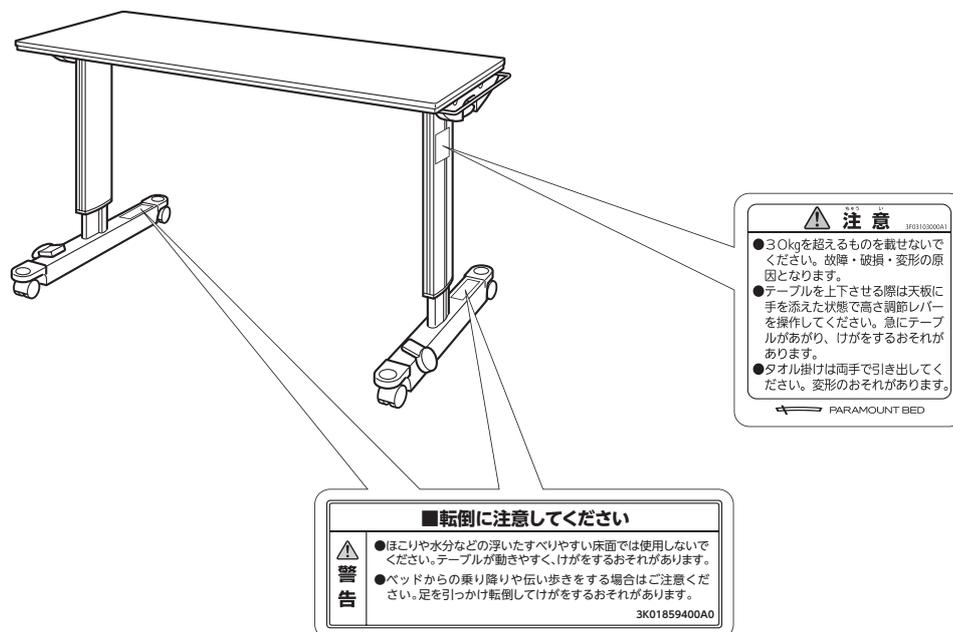



## ■テーブルと組合せて使用するベッドは、弊社が指定する適合品をご使用ください

- 指定以外の製品や他社製品と組合せると、意図せぬすき間の発生や製品同士の接触、安定性の低下などにより、けがをしたりテーブルやベッドが破損・変形したりするおそれがあります。適合品については、13 ページを参照してください。

## ■目的以外の用途に使用しないでください

- 歩行器や手すりなどの目的で使用しないでください。転倒してけがをしたり、テーブルが破損・変形したりするおそれがあります。

## ■天板や脚の上に乗らないでください

- 転落・転倒してけがをしたり、テーブルが破損・変形したりするおそれがあります。

## ■テーブルに寄り掛かったり体重をあずけたりしないでください

- このテーブルは移動式テーブルです。体重をあずけるとテーブルが動き、転倒してけがをしたり、テーブルが破損・変形したりするおそれがあります。
- 移動ロック状態でも、体重をあずけるとテーブルが動き、転倒してけがをしたり、テーブルが破損・変形したりするおそれがあります。  
(KF-833 \*\*のみ)

## ■テーブルをベッドに設置しているときはベッドの操作をしないでください

- テーブルとベッドやベッド用オプションの間にはさまれて、けがをするおそれがあります。
- テーブルとベッドやベッド用オプションが接触し、テーブルやベッド・ベッド用オプションが破損・変形するおそれがあります。
- ベッドの操作を行う場合は、テーブルをベッドから外してください。

## ■コード類（電源コードなど）をテーブルではさまないようにしてください

- コード類が破損し、感電・火災のおそれがあります。特にベッドの電源コードは、テーブルのキャスターやロック脚で踏まない位置に配線してください。（※ロック脚はKF-833 \*\*のみ）

## ■ものを載せた状態でテーブルの移動や高さ調節はしないでください

- ものが落下してけがをしたり、ものが破損・変形したりするおそれがあります。

## ■滑りやすいゆかや段差・凹凸のある場所では使用しないでください

- ほこりや水分などの浮いたゆかや段差・凹凸のある場所では、テーブルを使用しないでください。テーブルが動きやすくなり、転倒してけがをするおそれがあります。

## ■ベッドからの乗り降りやテーブルの周りで歩行する場合は足元に注意してください

- テーブルの脚に引っ掛かり、転倒してけがをするおそれがあります。
- 脚とゆかの間に足をはさんで、けがをするおそれがあります。

## ■テーブルを移動するときは足元に注意してください

- テーブルの脚とゆかの間に足をはさんだりキャスターに踏まれたりして、けがをするおそれがあります。

## 4 安全に使用するための注意事項



■操作を理解できないと思われる方や、体位を自分で保持できない方にはロックペダルや高さ調節レバーを操作させないでください

- 誤って操作したり、操作した際にバランスをくずしたりして、転落・転倒のおそれがあります。

■テーブルを移動させるときは、ロック解除状態にしてください  
(KF-833\*\* のみ)

- 移動ロック状態のままテーブルを引きずると、ロック脚が擦れ、ゆかを傷つけたり、テーブルが破損・変形したりするおそれがあります。

■ベッドやテーブルから身を乗り出して、高さ調節レバーを操作しないでください

- 転落してけがをするおそれがあります。

■お客様による修理・改造はしないでください

- 思わぬけがや故障の原因となります。

■直射日光のあたる場所や、ストーブなど熱器具の近くでの使用は避けてください

- 発火・変質・変形の原因となります。

■ガススプリングの取扱いには注意してください

- 支柱にはガススプリングを使用しています。分解・焼却処分を行うと破裂したり、ガスが吹き出したりして、けがをするおそれがあります。

■破損した場合は使用を中止してください

- けがをするおそれがあります。破損した場合はすぐに使用を中止し、お買い上げの販売店またはパラテクノコールセンター（14 ページ参照）まで修理をご依頼ください。

■テーブルは定期的に点検してください

- 定期的に各部のゆるみ、破損・変形・異音の有無、高さ調節レバーの操作、テーブルの状態（移動ロック／解除）などを点検してください。思わぬけがをするおそれがあります。点検項目につきましては、11 ページを参照してください。

■テーブルを固定する際は、左右のロックペダルを固定してください  
(KF-833 \*\*のみ)

- 片側のみを固定すると、テーブルが不安定になり、転倒してけがをするおそれがあります。

 **注意**

■ **テーブルを上下させる際は天板に手を添えて操作してください**

- 天板に手を添えず高さ調節レバーだけ操作すると、急にテーブルがあがり、けがをするおそれがあります。
- 高さ調節レバーの操作だけでは、テーブルをさげられない場合があります。

■ **テーブルの高さをさげる際は、支柱の下に足先などをはさまないように注意してください**

- けがをするおそれがあります。

■ **段差のある場所での移動は避けてください**

- 脚やキャスターが破損・変形したり、ゆかを傷つけたりするおそれがあります。やむを得ない場合は持ちあげて移動させてください。

■ **傷つきやすいゆかでは使用しないでください**

- ゆかを傷つけたり、汚したりするおそれがあります。

■ **30kg を超えるものを載せないでください**

- 故障・破損・変形の原因となります。また、破損・変形によりけがをするおそれがあります。

■ **天板の上に、熱したやかん・鍋などを直接載せないでください**

- 変形・変色の原因となります。

■ **天板に飲みものなどの水分をこぼしたり、水分を含んだものを放置したりしないでください**

- 破損・変色・変質・変形の原因となります。濡れたときは、すぐに乾いた布で拭き取ってください。

■ **天板に粘着力の強いテープなどを貼り付けないようにしてください**

- 表面のはがれ・破損の原因となります。

■ **スプレータイプの殺虫剤をテーブルに直接噴射しないでください**

- 殺虫剤に含まれる溶剤によってテーブルの天板や他の樹脂部分が破損・変色・溶解するおそれがあります。また、破損・溶解した部分で思わぬけがをするおそれがあります。

■ **可動部のすき間に手や指をはさまないように注意してください**

- けがをするおそれがあります。特に、高さ調節レバーと支柱カバーのすき間には、ご注意ください。

■ **タオル掛けには体重をあずけないでください**

- けがをしたり、破損・変形したりする原因となります。

■ **タオル掛けにはタオル以外のものは掛けしないでください**

- 破損・変形の原因となります。


■ **タオル掛けは両手で引き出してください**

- 変形のおそれがあります。


## 5 部品の確認

●開梱後、下記の部品がすべて揃っていること、破損していないことを確認してください。万一、部品の不足や破損があった場合には、販売店または直接弊社までご連絡ください。


### ■KF-832LA, LB, LD, LF, SA, SB

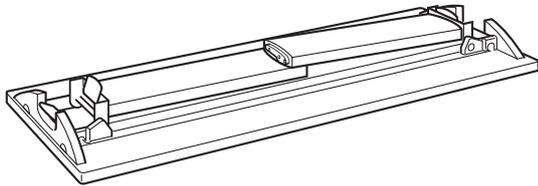

本体×1

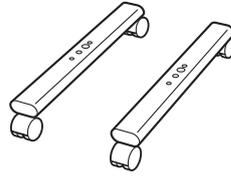

脚×2

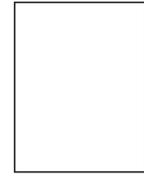


取扱説明書×1



座金付M8ボルト(長)×4



カラー×4

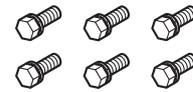


座金付M8ボルト(短)×6

【使用工具】

●ラチェットレンチ  
(対辺13mm)




●延長ロッド

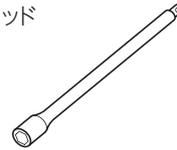


※付属されていません。お客様でご用意ください。


### ■KF-833LA, LB, LD, LF, SA, SB

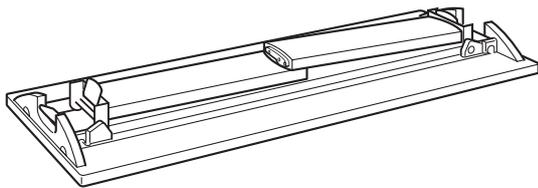

本体×1

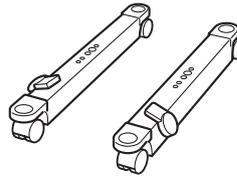

脚×2

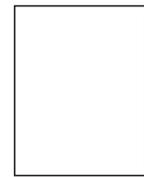

取扱説明書×1



六角穴付M8ボタンボルト(長)×4



座金付M8ボルト(短)×6

【使用工具】

●ラチェットレンチ  
(対辺13mm)



●延長ロッド



●六角レンチ(対辺5mm)





※付属されていません。お客様でご用意ください。

## 6 組立方法



●組立てるときや分解するときは、支柱と脚を手で支えてください。支柱が倒れると、身体の一部にぶつかったり手や指をはさんだりしてけがをするおそれがあります。また、部品が破損・変形するおそれがあります。

①本体を水平なゆかに置き、支柱をまっすぐ起こしてください。

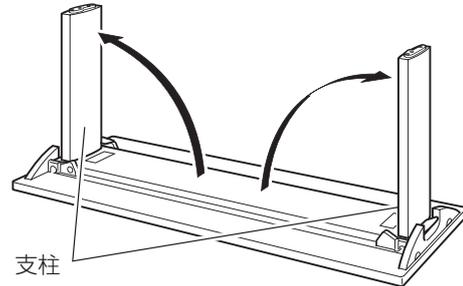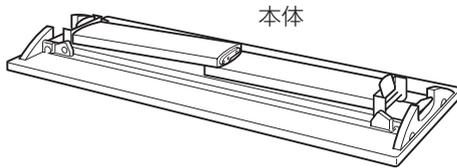

②下図のように支柱と天板を固定し、脚を支柱に取付けてください。





●脚には、正しく取付けるための向きがあります。下図の向きで取付けてください。誤った向きで組立てると、破損・変形のおそれがあります。  
※ガススプリングのない側の支柱には、ガススプリング固定金具は付いていません。

■ KF-832LA, LB, LD, LF, SA, SB

■ KF-833LA, LB, LD, LF, SA, SB

※ロックペダルを固定し、ロックペダルが外側になるように取付けてください。

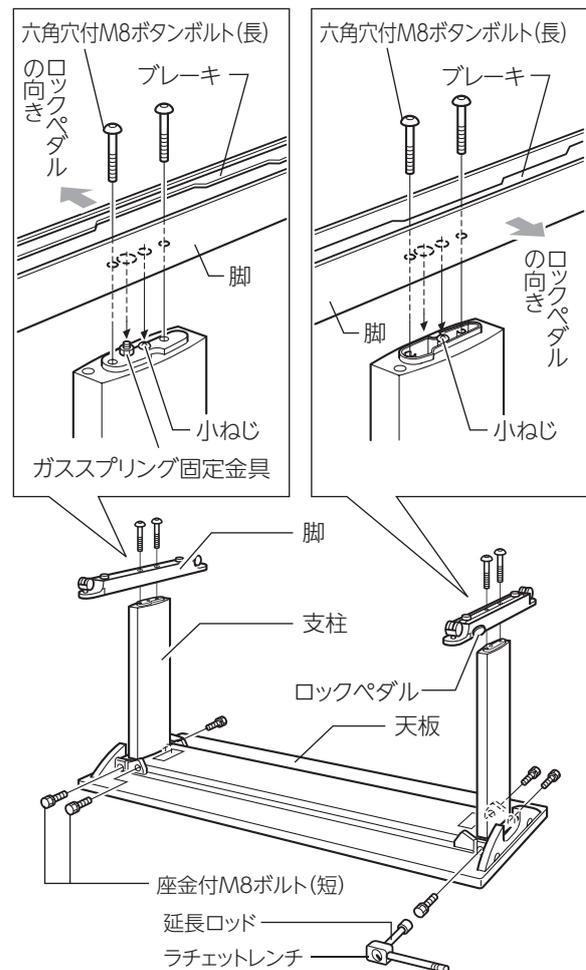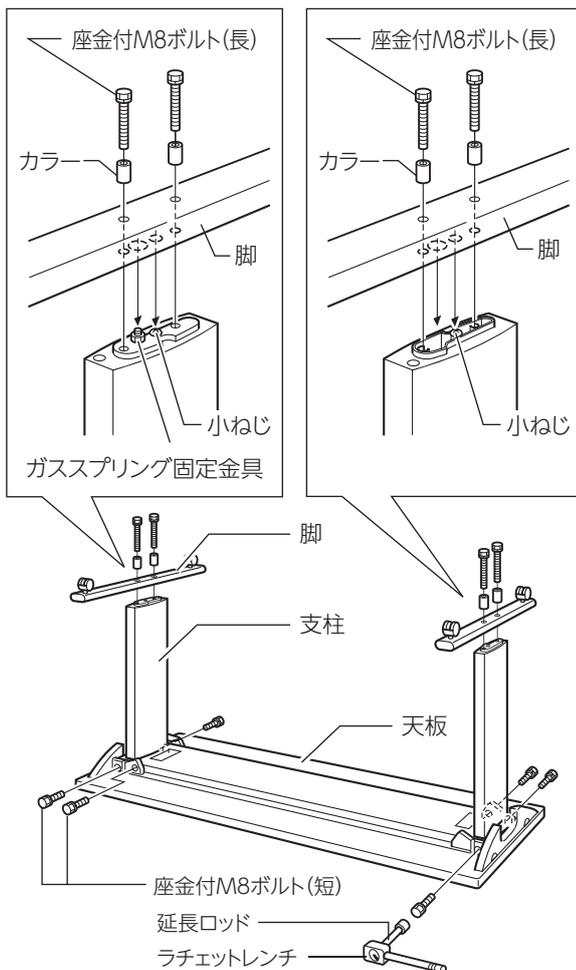

- 脚の取付けは穴位置を確認し、ロックペダルの向きに注意して組立ててください。(KF-833 \*\*のみ)
- ボルトは仮止めを行った後に、ラチェットレンチ、延長ロッド、六角レンチ (KF-833 \*\*のみ) を使用してしっかりと締付けてください。
- 支柱と天板を固定する際の推奨締付トルクは 12N・m、脚の固定は 6N・m です。

## 7 使用方法





- 操作を理解できないと思われる方や、体位を自分で保持できない方にはロックペダルや高さ調節レバーを操作させないでください。誤って操作したり、操作した際にバランスをくずしたりして、転落・転倒のおそれがあります。
- テーブルをベッドに設置しているときは、ベッドの操作をしないでください。思わぬけがをしたり、テーブルやベッド・ベッド用オプションが破損・変形したりするおそれがあります。
- テーブル以外の用途に使用しないでください。歩行器や手すりなどの目的で使用すると、転倒してけがをしたり、テーブルが破損・変形したりするおそれがあります。
- テーブルに寄り掛ったり体重をあずけたりしないでください。転倒してけがをしたり、テーブルが破損・変形したりするおそれがあります。
- ベッド周辺でテーブルを移動させる際は、ベッドのキャスター操作ステップにぶつからないように注意してください。キャスターロックが解除され、乗り降りの際などにベッドが動いて思わぬけがをするおそれがあります。




- 高さ調節機能のあるベッドと組合せて使用する際は、テーブルの脚がベッドの下に入り込まないようにしてください。ベッドの高さを下げた場合に、ベッドやベッドのボードとテーブルの脚が接触し、ベッドやテーブルが破損・変形したり、ベッドのヘッドボード・フットボードが外れて、けがをしたりするおそれがあります。

### ■テーブルのロック・解除 (KF-833 \*\*のみ)

- テーブルをロックする場合は、左右のロックペダルを踏み込んでください。
- テーブルのロックを解除する場合は、左右のロックペダルをつま先で押しあげてください。

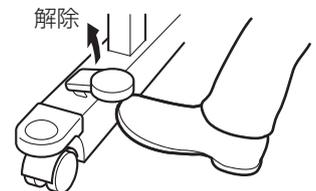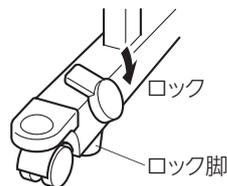


- ご使用前に、テーブルの状態（移動ロック／解除）を確認してください。
- ロック解除時は、テーブルが不意に動くおそれがあります。

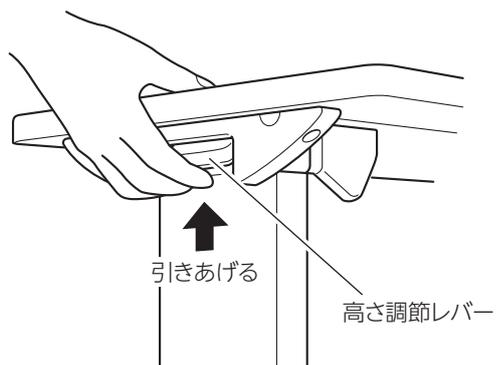

## ■テーブルの高さを調節するとき

●高さ調節レバーを引きあげたまま、天板に手を添えて、お好みの高さに調節してください。高さ調節レバーを離すとその位置で固定されます。

※高さ調節は左右どちらの高さ調節レバーでも行えます。

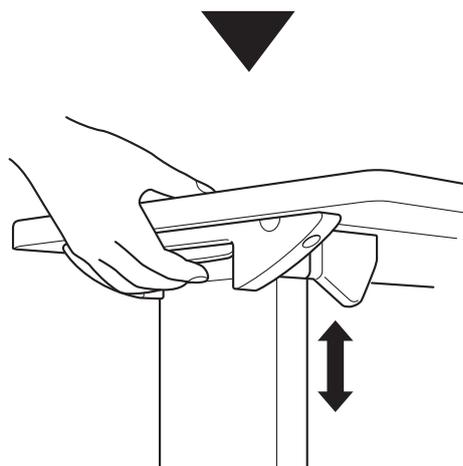

ちゅう  
**注 意**

●テーブルを上下させる際は天板に手を添えて操作してください。天板に手を添えず高さ調節レバーだけを操作すると、急にテーブルがあがり、けがをすることがあります。

## 8 定期点検

■安全にご使用いただくために、1年に1回は定期的に点検してください。使用の頻度や環境により製品は摩耗・劣化します。定期的に各部のゆるみ、可動部の動作、破損・変形・異音の有無などを点検してください。

■異常が認められた場合や詳しい点検をご希望される場合は、お買い上げの販売店またはパラテクノコールセンター（14ページ参照）までお問い合わせください。

■高さ調節や移動ロック・解除操作、テーブルの移動がしづらくなった場合、異音がする場合は、パラテクノコールセンター（14ページ参照）までお問い合わせください。



●お客様の使用頻度にもよりますが、高さ調節機構は、3年毎に注油が必要です。

※部品内部への複雑な注油のため、注油方法やご使用になる油につきましては、パラテクノコールセンター（14ページ参照）までお問い合わせください。

点検項目	参照ページ
テーブルの各部に破損や変形、ゆるみなどはありませんか？	—
座金付 M8 ボルトが確実に固定されていますか？	8
六角穴付 M8 ボタンボルトが確実に固定されていますか？ (KF-833 **のみ)	8
テーブルをスムーズに移動できますか？	9
移動ロック状態で、テーブルが容易に動きませんか？ (KF-833 **のみ)	9
テーブルの高さをスムーズに調節できますか？	10
各部の操作で異音などはありませんか？	9・10
安全ラベル・製品識別表示ラベルがはがれていたり、文字が消えたりしていませんか？	2・3
ベッドの電源コードをはさんだり、はさむおそれのある位置に設置されていませんか？	—
脚キャップに割れはありませんか？ (KF-832 **のみ)	2
ロック脚に著しい摩耗・削れ・汚れ・劣化はありませんか？ (KF-833 **のみ)	9

## 9 日常のお手入れ・長期保管・廃棄について

### <日常のお手入れ>

#### ■汚れを落とす場合

下記①～③の手順で行ってください。

- ①水で薄めた中性洗剤にひたした布をよくしぼって拭いてください。
- ②水にひたした布をよくしぼって、残った洗剤分を拭き取ってください。
- ③乾いた布で残った水分を拭き取ってください。

#### ■消毒する場合

必ず下記の消毒剤を指定の濃度で、消毒剤の取扱説明書などの指示に従ってご使用ください。

- |            |                       |
|------------|-----------------------|
| 76.9～81.4% | 消毒用エタノール              |
| ～0.2%      | 塩化ベンザルコニウム（オスバンなど）    |
| ～0.2%      | 塩化ベンゼトニウム（ハイアミンなど）    |
| ～0.05%     | グルコン酸クロルヘキシジン（ヒビテンなど） |
| ～1.0%      | 次亜塩素酸ナトリウム（ミルトンなど）    |



- 揮発性のもの（シンナー、ベンジン、ガソリンなど）やクレゾールは使用しないでください。変色・変質するおそれがあります。
- 消毒剤を使用する場合は、指定以外の薬品を使用しないでください。破損・変質するおそれがあります。
- 中性洗剤や消毒剤を使用した場合は、その後水拭きをしてください。水拭きをしないと樹脂やゴム（天板側面）が割れたり、変色・変質するおそれがあります。




- オゾン殺菌器、オートクレーブ滅菌器などには対応できません。

### <長期保管>

■長期にわたりテーブルをご使用にならないときは、下記の点にご注意ください。

1. 移動ロック状態で保管してください。（KF-833 \*\*のみ）
2. テーブルの上には何も載せないでください。
3. 高温・多湿・低温・乾燥・ほこりの多い場所を避けてください。  
温度 10～40℃、湿度 30～75% RH の環境で保管してください。
4. 取扱説明書は紛失しないよう、大切に保管してください。

■組立用のボルトは取外した後、支柱カバー裏側に右図のように収納することができます。

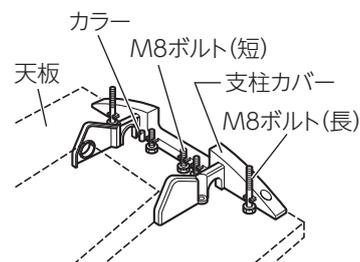

### <廃棄について>

■廃棄の際は、「廃棄物の処理および清掃に関する法律」および各自治体の規則に従ってください。

## 10 仕様

品名		オーバーベッドテーブル			
品番		KF-832LA,LB,LD,LF	KF-832SA,SB	KF-833LA,LB,LD,LF	KF-833SA,SB
寸法 (cm)	全幅	128.4	114.4	128.4	114.4
	奥行	43.2 (天板寸法 40)		63.4 (天板寸法 40)	
	高さ	63 ~ 95			
支柱内寸法 (cm)		112.5	98.5	112.5	98.5
製品質量 (kg)		22	20	25	23
主な材質 および 表面処理	天板	合成樹脂化粧パーティクルボード (軟質ウレタンエッジ一体成形)			
	支柱	アルミニウム / アルマイト処理に電着塗装仕上げ			
	脚	スチール製 / 電着・粉体塗装仕上げ			
	脚キャップ	ナイロン樹脂	—		
耐荷重		30kg (294N)			
動作保証 条件	温度	10 ~ 40℃			
	湿度	45 ~ 75% RH			
キャスター		Ø40mm 双輪キャスター			
適合品		総幅 110cm 以下の 弊社製ベッド	総幅 96cm 以下の 弊社製ベッド	総幅 110cm 以下の 弊社製ベッド	総幅 96cm 以下の 弊社製ベッド
		※ベッドに取付けているオプションの幅を含みます ※オプションの併用でご不明な点は、お買い上げの販売店または直接弊社まで お問い合わせください			
耐用期間		8年 [自己認証 (当社データ) による] ※ただし消耗部品は除く			

※「品番」末尾の A,B,D,F は、天板の色を表しています。

A: アイボリー B: ミディアム D: ウォールナット (ダーク) F: ナチュラル

# 11 アフターサービスについて

## 1. 保証書

保証書は、必ず「販売店名・お買い上げ日」などの記入をお確かめになり、記載内容をよくお読みいただき大切に保管してください。保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

販売店名・お買い上げ日の記入が無い場合は、品番・販売店・お買い上げ日が確認できるように、製品をお買い上げの領収書などを保証書と一緒に保管してください。

## 2. 修理を依頼される時

修理のご依頼は、お買い上げの販売店または弊社製品の修理受付窓口であるパラテクノコールセンター（下記参照）までご連絡ください。

### ■連絡していただきたい内容

- 品名、品番
- 製品識別表示ラベルの番号（天板裏側の金属フレーム側面・脚裏面（KF-832 \*\*）・脚側面（KF-833 \*\*）に貼付：2ページ「各部の名称」参照）
- お買い上げ日 ●故障または異常の内容（できるだけ詳しく）
- 施設名、お名前、ご住所および電話番号

### ■消耗部品について

- キャスターは消耗部品です。

### 保証期間内は

保証書の記載内容に基づき無償で修理いたします。ただし、保証期間内でも修理が有償になる場合があります。詳しくは保証書をご覧ください。

### 保証期間が過ぎているとき

修理により使用できる製品については、ご要望により有償で修理いたします。

## 3. 部品の最低保有年数は

弊社では、この製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）の最低保有期間を製造打ち切り後8年としております。

## 4. アフターサービスについてご不明な場合

お買い上げの販売店、またはパラテクノコールセンターまでお問い合わせください。

パラテクノコールセンター ☎0120-54-8639

受付時間：平日8:00～18:00／土・日・祝日9:00～17:00（年始は休業いたします）

### 【パラテクノ株式会社について】

弊社製品の修理や保守点検などの各種サービスを実施する会社です。

### <パラマウントベッド 株式会社>

本社	〒136-8670	東京都江東区東砂2丁目14番5号	☎(03)3648-1111(大代)
東京支店	〒136-8670	東京都江東区東砂2丁目14番5号	☎(03)3648-1171(代)
札幌支店	〒060-0062	札幌市中央区南2条西13丁目318番地11	☎(011)271-1181(代)
仙台支店	〒984-0015	仙台市若林区卸町2丁目3番地の3	☎(022)239-5211(代)
さいたま支店	〒336-0967	さいたま市緑区美園3丁目23番1	☎(048)878-0100(代)
横浜支店	〒194-0004	東京都町田市鶴間5丁目3番33号	☎(042)795-8800(代)
名古屋支店	〒461-0001	名古屋市東区泉1丁目20番17号	☎(052)963-0600(代)
大阪支店	〒550-0001	大阪市西区土佐堀2丁目3番33号	☎(06)6443-8791(代)
高松営業所	〒761-8031	高松市郷東町223番1	☎(087)881-8900(代)
広島支店	〒733-0011	広島市西区横川町3丁目8番5号	☎(082)293-1311(代)
福岡支店	〒812-0013	福岡市博多区博多駅東3丁目14番20号	☎(092)461-1131(代)

# 保証書

品名	オーバークベッドテーブル	品番	KF-832LA, LB, LD, LF, SA, SB KF-833LA, LB, LD, LF, SA, SB
保証期間	1年間		
★ お買い上げ日	年 月 日		
お客様	お名前		
	ご住所	〒□□□□ - □□□□ ☎ ( )	
★ 販売店	店名		
	住所	☎ ( )	

★印欄の情報が確認できない場合は無効となりますので販売店から発行された★印欄の情報が確認できる領収書などを、本保証書と一緒に大切に保管してください。

この保証書は、本書の記載内容に基づき無償修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から上記保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書きに従った正しい使用状態で故障した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

※本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

## 保証規定

- 保証期間内(お買い上げの日より1年間)に、正常なご使用状態において故障した場合は、無償で修理いたします。
- 次のような場合は、保証期間内でも修理は有償となります。
  - 使用上の誤り、あるいは不当な改造や修理による故障および損傷
  - 弊社が指定する適合品以外の製品と組合せて使用したことによる故障および損傷
  - お買い上げ後の移動、設置、落下あるいは輸送による故障および損傷
  - 火災、煙害、異常電圧および地震、雷、風水害、その他、天災地変などによる故障および損傷
  - 保証書のご提示がない場合
  - 本保証書の保証期間および販売店名が確認できない場合
  - 字句を書き換えるなどの不正行為が発覚した場合
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
  - This warranty is valid only in Japan.

修理実施日	修理内容	担当者

※この保証書は、本書に明示した期間、条件の基において無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げの販売店、またはパラテクノコールセンターまでお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは取扱説明書の中の「アフターサービスについて」をご覧ください。

パラマウントベッド株式会社 〒136-8670 東京都江東区東砂2丁目14番5号