

## KQ-P732

# 脚座ゴムシート

### まえがき

このたびは、脚座ゴムシートをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

この「取扱説明書」には、脚座ゴムシートを安全にお使いいただくための注意事項と使用方法などを記載しています。

- 脚座ゴムシートをご使用になる前に、必ずこの「取扱説明書」および適合するベッドの「取扱説明書」をお読みいただき、正しく安全な取扱方法を理解してください。
- この「取扱説明書」はお読みになった後も、いつでも見られる場所に保管してください。
- この製品は改良などにより、この「取扱説明書」の内容と一部異なる場合があります。
- 動作範囲・寸法・角度・質量などの数値の記載がある場合、その数値には多少の誤差が含まれます。特別なものを除きこの「取扱説明書」では、表示を見やすくするため、約・およそといった言葉を省略しております。
- ご不明な点がありましたら、お買い上げの販売店または直接弊社までお問い合わせください。

## 使用目的

■この製品は、脚座やキャスターによるゆかの傷つきを予防することを目的に作られています。

## 安全に使用するための注意事項



けい こく  
**警告**

この表示を無視して誤った取扱いをすると、死亡または重傷（骨折・圧迫・麻痺など）を負う可能性が想定される内容を示しています。

■脚座ゴムシートと組合せて使用するベッドは弊社が指定する適合品をご使用ください

- 指定以外の製品や他社製品と組合せると、思わぬけがをしたり、脚座ゴムシートが破損したりするおそれがあります。

■火気に近づけないでください

- 脚座ゴムシートやベッドの近くで、ストーブなどの熱器具を使用しないでください。変質・変形・火災などの原因となります。

■お客様による修理・改造はしないでください

- 思わぬけがや破損の原因となります。



ちゅう い  
**注意**

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が軽傷（打撲・すり傷・切り傷など）を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示しています。


■塩化ビニル系のゆか材での使用は避けてください

- ゆか材に脚座ゴムシートの色が移り、汚す可能性があります。

■スプレータイプの殺虫剤を脚座ゴムシートに直接噴射しないでください

- 殺虫剤に含まれる溶剤によって脚座ゴムシートが破損するおそれがあります。また、破損した部分で思わぬけがをするおそれがあります。

# 使用方法

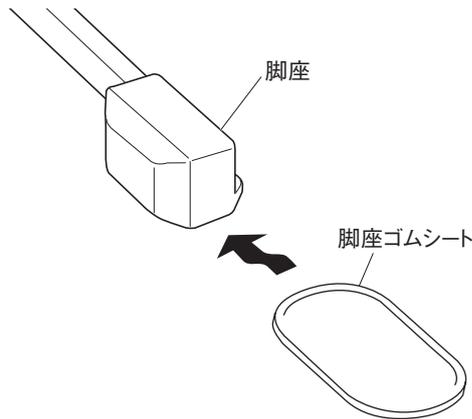

①使用する前に脚座ゴムシートの表面を拭いてください。



●脚座ゴムシートの表面を拭いてから使用してください。そのまま使用すると、身体を支えるためにベッドのボードにつかまった際やベッドから降り降りする際にベッドが滑って、思わぬけがをすることがあります。

②ベッドのフレームを持って脚座・キャスターの下に脚座ゴムシートを差込み、脚座・キャスターが脚座ゴムシートの縁に乗りあげないように位置をあわせてください。(4ヶ所)



●手や足がはさまれないように十分に注意して作業を行ってください。



●脚座ゴムシートが確実に設置され、ベッドが安定していることを確認してください。安定しない状態で使用すると、思わぬけがや破損の原因となります。

## 仕様

品名	脚座ゴムシート (4枚セット)
品番	KQ-P732
寸法 (cm)	長さ17×幅11×厚さ0.7
製品質量 (g)	150 (1枚)
材質	ゴム (EPDM)

適合品	楽匠プラスシリーズ (Hタイプ*1/Xタイプ)、楽匠Wingシリーズ*2、レントシリーズ、KQ-B6000シリーズ、INTIME1000シリーズ、INTIME3000シリーズ、Active Sleep BED (RA-3*50*/RA-3*70*)
-----	--

※1 キャスター (KQ-P70C) を取り付けた場合に使用できます。  
※2 キャスター (RQ-P30C) を取り付けた場合に使用できます。

## お手入れ・長期保管について

### ■日常のお手入れ

#### ●汚れの落とし方

- ①水で薄めた中性洗剤にひたした布を、よくしぼって拭いてください。
- ②水でひたした布をよくしぼって、残った洗剤分を拭き取ってください。
- ③乾いた布で残った水分を拭き取ってください。

※揮発性のもの (シンナー、ベンジン、ガソリンなど) やクレゾールは使用しないでください。変色・変質するおそれがあります。

### ■長期保管する場合

- 高温・多湿・低温・乾燥・ほこりの多い場所を避けてください。温度-10~50℃、湿度30~90% RHの環境で保管してください。
- 取扱説明書を紛失しないよう、大切に保管してください。

### ■アフターサービスについてご不明な場合

お買い上げの販売店、またはパラテクノコールセンターまでお問い合わせください。

パラテクノコールセンター ☎ 0120-54-8639

受付時間: 平日8:00~18:00 / 土・日・祝日9:00~17:00 (年始は休業いたします)

【パラテクノ株式会社について】 弊社製品の修理や保守点検などの各種サービスを実施する会社です。

### <パラマウントベッド 株式会社>

本社 〒136-8670 東京都江東区東砂2丁目14番5号 ☎(03)3648-1111(代)  
東京支店 〒136-8670 東京都江東区東砂2丁目14番5号 ☎(03)3648-1171(代)  
札幌支店 〒060-0062 札幌市中央区南2条西13丁目318番地11 ☎(011)271-1181(代)  
仙台支店 〒984-0015 仙台市若林区卸町2丁目3番地の3 ☎(022)239-5211(代)  
さいたま支店 〒336-0967 さいたま市緑区美園3丁目23番1 ☎(048)878-0100(代)  
横浜支店 〒194-0004 東京都町田市鶴間5丁目3番33号 ☎(042)795-8800(代)

名古屋支店 〒461-0001 名古屋市東区泉1丁目20番17号 ☎(052)963-0600(代)  
大阪支店 〒550-0001 大阪市西区土佐堀2丁目3番33号 ☎(06)6443-8791(代)  
高松営業所 〒761-8031 高松市郷東町223番1 ☎(087)881-8900(代)  
広島支店 〒733-0011 広島市西区横川町3丁目8番5号 ☎(082)293-1311(代)  
福岡支店 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3丁目14番20号 ☎(092)461-1131(代)

2025-02

製版:株式会社 ハル