

KQ-PC01C/KQ-PC02C

保証書付

フットパネル 楽匠Fitシリーズ専用

まえがき

このたびは、フットパネルをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。


この「取扱説明書」には、フットパネルを安全にお使いいただくための注意事項と使用方法などを記載しています。

- フットパネルをお使いになる前に、必ずこの「取扱説明書」、フットパネルを取り付けるベッド（楽匠Fitシリーズ <KQ-C*****>）の「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全な取扱方法を理解してください。
- ベッドで療養する方ばかりでなく、介護する方もこの「取扱説明書」、ベッドの「取扱説明書」をよくお読みください。
- この「取扱説明書」はお読みになった後も、いつでも見られる場所に保管してください。
- お買い上げの製品は、改良などにより、この「取扱説明書」の内容と一部異なる場合があります。
- 動作範囲・寸法・角度・質量などの数値の記載がある場合、その数値には多少の誤差が含まれます。特別なものを除きこの「取扱説明書」では、表示を見やすくするため、約・およそといった言葉を省略しております。
- ご不明な点がありましたら、お買い上げの販売店または直接弊社までお問い合わせください。

使用目的

- このフットパネルは、ベッドの足側にあるボード受金具にボードの代わりに取り付け、ベッド足側からの介助をしやすくすることを目的に作られています。

各部の名称と部品の確認

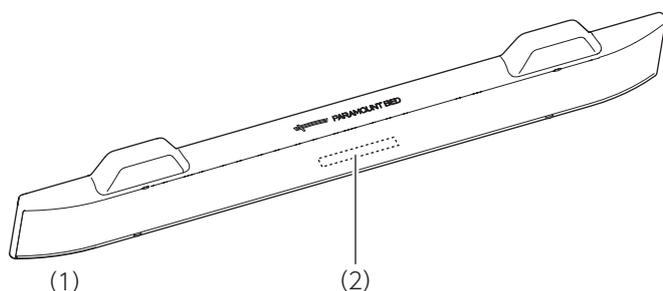

(1)	本体×1
(2)	製品識別表示ラベル
(3)	取扱説明書×1

仕様

品名	フットパネル	
	KQ-PC01C	KQ-PC02C
品番	モスグリーン	キャメル
色		
主要寸法 (奥行×幅×高さ) (cm)	4.6×86×11.7	
製品質量 (kg)	0.5	
材質	ポリプロピレン・ポリウレタン系シート	
適合品	楽匠Fitシリーズ (KQ-C*****)	

- 楽匠Fitシリーズ (KQ-C*****S・KQ-C*****Bは除く) と、このフットパネルの組み合わせはJIS認証を取得しています。

本書に記載されているマークについて

Note	特に重要な内容や間違いやすい内容、注意点などを記載していることを示しています。
	ベッドの方向 (頭側) を示しています。
	ベッドの方向 (足側) を示しています。

安全に使用するための注意事項

 けい 告 こく	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、死亡または重傷（骨折・圧迫・麻痺 ^{まひ} など）を負う可能性が想定される内容を示しています。
---	---

■フットパネルを直接取り付け使用するベッドは弊社が指定する適合品をご使用ください。

- このフットパネルは楽匠Fitシリーズ（KQ-C****）専用です。指定以外の製品や他社製品と組み合わせると、思わぬけがや破損のおそれがあります。

■体位を自分で保持できない方は使用しないでください。

- 転落・転倒して、けがをするおそれがあります。

■エアマットレス（適合品）を使用する場合は、マットレスストッパー（KQ-PC00D）を取り付けてください。

- エアマットレスが落下して転落・転倒し、けがをするおそれがあります。

■フットパネルや足ボトム（フットパネル付近）に腰掛けないでください。

- ベッドから転落・転倒したりベッドやフットパネルなどが破損・変形したりして、けがをするおそれがあります。
- 意図せぬすき間が発生し、はさまれたり抜けなくなったりするなどして、けがをするおそれがあります。



■フットパネルを取り付けた状態で、ユニットを持ち運ばないでください。

- 落としたときにフットパネルが破損して、けがをするおそれがあります。

■フットパネルに寄りかかったり、手すり代わりにしたりしないでください。

- フットパネルが不意に外れ、転落・転倒してけがをするおそれがあります。
- フットパネルに大きな力がかかり、フットパネルが破損・変形するおそれがあります。

■フットパネルに足を掛けて乗り降りしないでください。

- ベッドから転落・転倒して、けがをするおそれがあります。
- フットパネルに大きな力がかかり、フットパネルが破損・変形するおそれがあります。

■修理・改造はしないでください。

- 意図せぬすき間の発生などにより、けがをするおそれがあります。

■フットパネルが、指定の取付位置に確実に固定されていることを確認してください。

- フットパネルが落下して、けがをしたりフットパネルが破損したりするおそれがあります。
- 意図せぬすき間が発生し、はさまれたり、抜けなくなるなどしてけがをするおそれがあります。

■フットパネルを持って、ベッドを移動しないでください。

- フットパネルが不意に外れ、転倒などしてけがをするおそれがあります。
- フットパネルに大きな力がかかり、フットパネルが破損・変形するおそれがあります。

 ちゅう 意 い	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が軽傷（打撲・すり傷・切り傷など）を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示しています。
---	---

■フットパネルの角に注意してください。

- 足などをぶつけて、けがをするおそれがあります。

■フットパネルにもものを引っ掛けないでください。

- フットパネルが破損・変形するおそれがあります。

■スプレータイプの殺虫剤を、フットパネルに直接噴射しないでください。

- 殺虫剤に含まれる溶剤によって、フットパネルが破損・変色・溶解するおそれがあります。また、破損・溶解した部分で思わぬけがをするおそれがあります。

■フットパネルに加湿器などの蒸気を直接当てないでください。

- フットパネルが破損・変質するおそれがあります。水分などが付いた場合は、乾いたタオルなどですみやかに拭き取ってください。




取付手順・取外手順



- フットパネルを取り付けるときは、ボード受金具にしっかりと固定してください。
 - フットパネルが落下して、けがをしたりフットパネルが破損したりするおそれがあります。
 - 意図せぬすき間が発生し、はさまれたり、抜けなくなるなどしてけがをするおそれがあります。
- フットパネルをベッドの頭側に取り付けしないでください。
 - 意図せぬすき間が発生し、はさまれたり、抜けなくなるなどしてけがをするおそれがあります。



- フットパネルの取り付け、取り外しのときは、手や指をはさまないように注意してください。
 - けがをするおそれがあります。

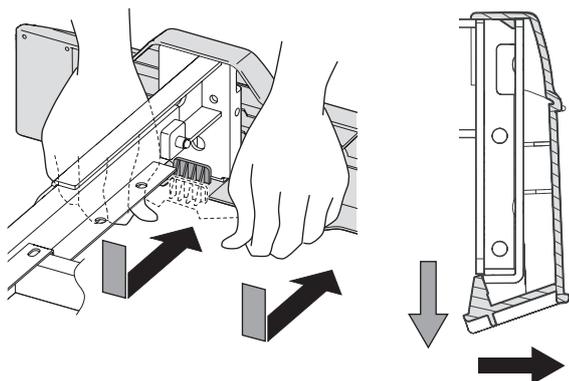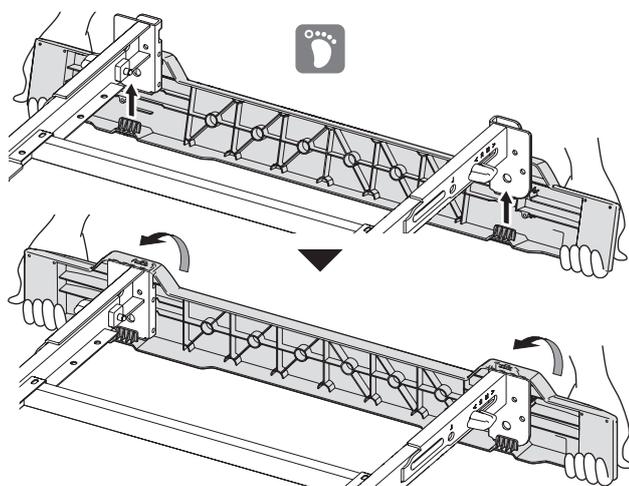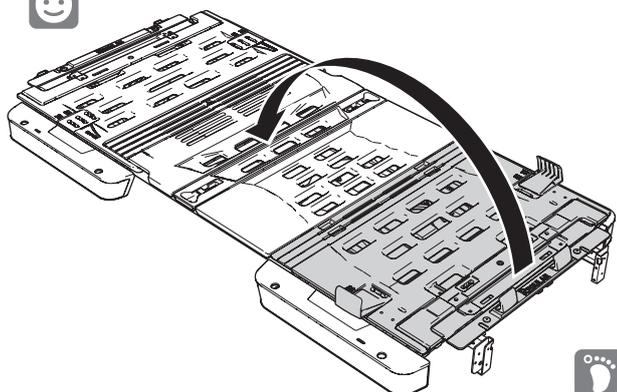

Note

ベッドに利用者がある場合は、ベッドから降りていただき、寝具・マットレスなどをベッドから降ろしてから、取付作業・取外作業をしてください。

取付手順

Note

ベッドの足側にボードが取り付けられている場合は、ベッドの取扱説明書を参照して、足側のボードを外してください。

- ①膝・足ボトムを矢印の方向へ倒す。または膝・足ボトムを外す。(ベッドの取扱説明書を参照)
- ②凸部(ロゴがある面)を上に向け、フットパネルの両端を持つ。
- ③フットパネル下部のツメ(2ヶ所)をボード受金具に下側から引っ掛ける。(2ヶ所)
- ④フットパネル上部のツメ(2ヶ所)をボード受金具の上部に「パチン」と音がするまで持ちあげながら押し込む。(2ヶ所)
※ツメが掛かりにくいときは、フットパネルを少し持ち上げるようにしながら押し込んでください。
- ⑤膝・足ボトムを元の位置に戻す。膝・足ボトムを外した場合は、ベッドの取扱説明書を参照して取り付ける。

取外手順

- ①膝・足ボトムを矢印の方向へ倒す(取付手順①図参照)。または膝・足ボトムを外す。(ベッドの取扱説明書を参照)
- ②フットパネル下部のツメの両側(2ヶ所)を持って、下方向に押し本体をたわませて、ツメを外側に外す。(2ヶ所)
- ③フットパネルをボード受金具から取り外す。
- ④膝・足ボトムを元の位置に戻す。膝・足ボトムを外した場合は、ベッドの取扱説明書を参照して取り付ける。

Note

フットパネルを取り外した後、そのままの状態でもベッドを使用しないでください。ベッドの取扱説明書を参照して、適合のボードかフットパネルを取り付けた状態でベッドを使用してください。

日常のお手入れ・長期保管について

■日常のお手入れ

- 汚れを落とす場合は、水で薄めた中性洗剤にひたした布をよくしぼって拭き、その後水にひたした布をよくしぼって、残った洗剤分を拭き取ってください。最後に乾いた布で残った水分を拭き取ってください。
- 消毒剤を使用する場合は必ず下記の薬品を指定の濃度でご使用ください。
76.9～81.4% 消毒用エタノール
～0.2% 塩化ベンザルコニウム (オスバンなど)
～0.2% 塩化ベンゼトニウム (ハイアミンなど)
～0.05% グルコン酸クロロヘキシジン (ヒビテンなど)
～0.05% 次亜塩素酸ナトリウム (ミルトンなど)

Note オゾン殺菌器、オートクレーブ滅菌器などには対応できません。

■長期保管する場合

- 高温・多湿・低温・乾燥・ほこりの多い場所を避けてください。温度-10～50℃、湿度30～90%RHの環境で保管してください。
- 取扱説明書を紛失しないよう、大切に保管してください。

アフターサービスについて

1. 保証書

保証書は、必ず「販売店名・お買い上げ日」などの記入をお確かめになり、記載内容をよくお読みいただき大切に保管してください。保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

販売店名・お買い上げ日の記入がない場合は、品番・販売店・お買い上げ日が確認できるように、製品をお買い上げの領収書などを保証書と一緒に保管してください。

2. 修理を依頼される時

修理のご依頼は、お買い上げの販売店または弊社製品の修理受付窓口であるパラテクノコールセンター（下記参照）までご連絡ください。

■連絡していただきたい内容

- 品名、品番、製品識別表示ラベルの番号（ラベルの貼付位置は表紙「各部の名称と部品の確認」を参照）
- お買い上げ日 ●破損または異常の内容(できるだけ詳しく) ●お名前、ご住所および電話番号

■保証期間内は

保証書の記載内容に基づき無償で修理いたします。ただし、保証期間内でも修理が有償になる場合があります。詳しくは保証書をご覧ください。

■保証期間が過ぎているときは

修理により使用できる製品については、ご要望により有償で修理いたします。

3. 部品の最低保有年数は

弊社では、この製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）の最低保有期間を製造打ち切り後8年としております。

4. アフターサービスについてご不明な場合

お買い上げの販売店、またはパラテクノコールセンターまでお問い合わせください。

パラテクノコールセンター ☎0120-54-8639

受付時間：平日8:00～18:00 / 土・日・祝日9:00～17:00 (年始は休業いたします)

【パラテクノ株式会社について】 弊社製品の修理や保守点検などの各種サービスを実施する会社です。

保証書

品名 / 品番	フットパネル / KQ-PC01C・KQ-PC02C	保証期間	★お買い上げ日	年	月	日より1年間
お客様	お名前	★販売店 (店名・住所)	☎	()		
	〒					
	ご住所					

★印欄の情報が確認できない場合は無効となりますので販売店から発行された★印欄の情報が確認できる領収書などを、本保証書と一緒に大切に保管してください。
この保証書は、本書の記載内容に基づき無償修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から上記保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書きに従った正しい使用状態で故障した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
※本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

【保証規定】

- 保証期間内（お買い上げ日より1年間）に、正常なご使用状態において故障した場合は、無償で修理いたします。
- 次のような場合は、保証期間内でも修理は有償となります。
 - (1) 使用上の誤り、あるいは不当な改造や修理による故障および損傷
 - (2) 弊社が指定する適合品以外の製品と組み合わせて使用したことによる故障および損傷
 - (3) お買い上げ後の移動、設置、落下あるいは輸送による故障および損傷
 - (4) 火災、煙害、異常電圧および地震、雷、風水害、その他、天災地変などによる故障および損傷
 - (5) 保証書のご提示がない場合
 - (6) 本保証書の保証期間および販売店名が確認できない場合
 - (7) 字句を書き換えるなどの不正行為が発覚した場合
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
● This warranty is valid only in Japan.

<パラマウントベッド株式会社>

本社 〒136-8670 東京都江東区東砂 2 丁目 14 番 5 号 ☎(03)3648-1111(代)
東京支店 〒136-8670 東京都江東区東砂 2 丁目 14 番 5 号 ☎(03)3648-1171(代)
札幌支店 〒060-0062 札幌市中央区南 2 条西 13 丁目 318 番地 11 ☎(011)271-1181(代)
仙台支店 〒984-0015 仙台市若林区卸町 2 丁目 3 番地の 3 ☎(022)239-5211(代)
さいたま支店 〒336-0967 さいたま市緑区美園 3 丁目 23 番 1 ☎(048)878-0100(代)
横浜支店 〒194-0004 東京都町田市鶴岡 5 丁目 3 番 33 号 ☎(042)795-8800(代)

名古屋支店 〒461-0001 名古屋市東区泉 1 丁目 20 番 17 号 ☎(052)963-0600(代)
大阪支店 〒550-0001 大阪市西区土佐堀 2 丁目 3 番 33 号 ☎(06)6443-8791(代)
高松営業所 〒761-8031 高松市郷東町 2 2 3 番 1 ☎(087)881-8900(代)
広島支店 〒733-0011 広島市西区横川町 3 丁目 8 番 5 号 ☎(082)293-1311(代)
福岡支店 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 3 丁目 14 番 20 号 ☎(092)461-1131(代)

2025-02
製版：株式会社 ハル