

KQ-PC00A

保証書付

ハイトスペーサー 楽匠 Fit シリーズ専用

まえがき

このたびは、ハイトスペーサーをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
この「取扱説明書」には、ハイトスペーサーを安全にお使いいただくための注意事項や使用方法などを記載しています。

- ハイトスペーサーをお使いになる前に、必ずこの「取扱説明書」および楽匠 Fit シリーズの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全な取扱方法を理解してください。
- ベッドで療養する方ばかりでなく、介護する方もこの「取扱説明書」および、楽匠 Fit シリーズの「取扱説明書」をよくお読みください。
- この「取扱説明書」はお読みになった後も、いつでも見られる場所に保管してください。
- お買い上げの製品は改良などにより、この「取扱説明書」の内容と一部異なる場合があります。
- 動作範囲・寸法・角度・質量などの数値の記載がある場合、その数値には多少の誤差が含まれます。特別なものを除きこの「取扱説明書」では、表示を見やすくするため、約・およそといった言葉を省略しております。
- ご不明な点がございましたら、お買い上げの販売店または直接弊社までお問い合わせください。

使用目的


- このハイトスペーサーはベッドの脚座に取り付けて、ベッドの高さを高くしたり、ベッド下のスペースを広げたりすることを目的に作られています。

適合品


- 楽匠 Fit H タイプ (KQ-C5 ****、KQ-C6 ****、KQ-CA ****) シリーズ専用です。
- 楽匠 Fit シリーズと、このハイトスペーサーの組合せは JIS 認証を取得しています。

開梱と部品の確認


- 開梱後、下記の部品がすべて揃っていること、破損していないことを確認してください。万一、部品の不足や破損があった場合には、販売店または直接弊社までご連絡ください。

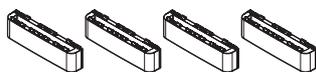

ハイトスペーサー(4個)

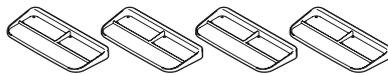


ゴムシート(4枚)

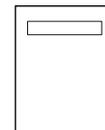


取扱説明書(1部)

各部の名称

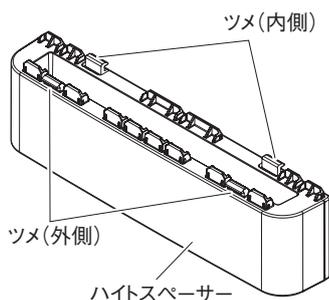

■取付状態

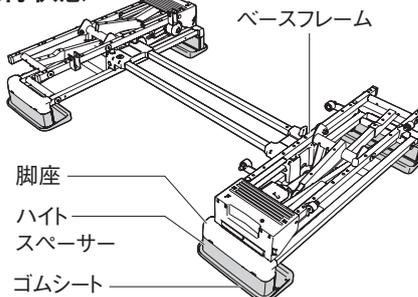

ハイトスペーサーを使用することによりベッドの高さが7cm高くなります。
(最低ボトム高さ* 28cm)

※最低ボトム高さは、ゆかからボトム上面までの高さを示しています。

安全に使用するための注意事項



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、死亡または重傷(骨折・圧迫・麻痺など)を負う可能性が想定される内容を示しています。

■ゴムシートとハイトスペーサーは位置をあわせて敷いてください

- ハイトスペーサーがゴムシートの縁に乗り上げると、ベッドが傾いたり落下し、転落・転倒してけがをしたり、ベッドが破損・変形してけがをするおそれがあります。

■ハイトスペーサー使用時にテーブルの脚などをハイトスペーサーにぶつけないでください

- ハイトスペーサーが外れ、ベッドが傾いたり落下し、転落・転倒してけがをしたり、ベッドが破損・変形してけがをするおそれがあります。

■お客様による修理・改造はしないでください

- 思わぬけがや破損の原因となります。

■弊社が指定する適合品以外の製品とは組合せないでください

- このハイトスペーサーは楽匠Fitシリーズ専用です。指定以外の製品や他社製品と組合せると、思わぬけがや破損の原因となります。

■火気に近づけないでください

- ゴムシートの近くでストーブなどの熱器具を使用しないでください。変質・変形・発火するおそれがあります。



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が軽傷(打撲・すり傷・切り傷など)を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

■ハイトスペーサーを取り付けた状態でベッドを引きずらないでください

- ゆかを傷つけたり、ベッドおよびハイトスペーサーが破損する原因となります。

■塩化ビニル系のゆか材での使用は避けてください

- ゆか材に脚座ゴムシートの色が移り、ゆか材が変色するおそれがあります。

■スプレータイプの殺虫剤をハイトスペーサーに直接噴射しないでください

- 殺虫剤に含まれる溶剤によってハイトスペーサーが破損・変色・溶解などするおそれがあります。また、破損・溶解した部分で思わぬけがをするおそれがあります。


取付方法



- 使用する前にゴムシートの表面・裏面を拭いてください。そのまま使用すると、ベッドに寄り掛かったり乗り降りするときにベッドが滑って、思わぬけがをするおそれがあります。
- ゴムシートを敷く方向を間違えないでください。ハイトスペーサーが外れ、ベッドが傾いたり落下し、転落・転倒してけがをしたり、ベッドが破損・変形してけがをするおそれがあります。
- 脚座に直接ゴムシートを敷いて使用しないでください。ベッドが傾き、思わぬけがや破損の原因となります。
- ゴムシートに刻印されている下記注意書きも確認してください。
 - ・必ずハイトスペーサーとセットで使用・管理してください。
 - ・こちらをベッド内側に向けてください。
 - ・この面にハイトスペーサーを載せてください。



- 組立てられているベッドにハイトスペーサーを取り付けるときは、ボード、フットパネル、ボトム、頭側・足側フレームを外し、脚座、頭側・足側ベースフレーム、台車連結管が付いた状態で作業を行ってください。ベッドを分解せずに取り付けを行うと、思わぬけがや破損の原因となります。(ベッドの分解方法は、ベッドの「取扱説明書」を参照してください。)
- 取り付けの際、脚座とハイトスペーサーの間などに指をはさまないように注意してください。けがをするおそれがあります。

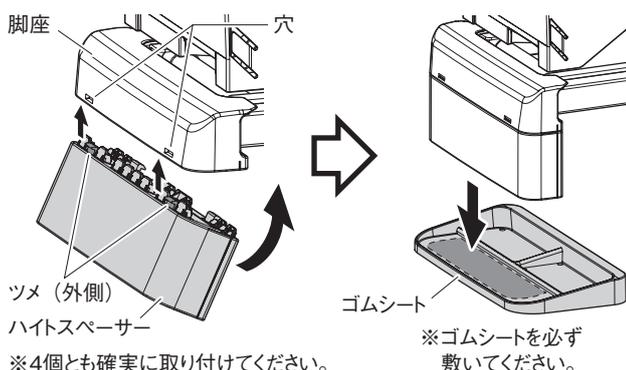


- ①図のように、ハイトスペーサーのツメ(外側)を脚座の穴に引っ掛けてください。(2ヶ所)
 - ②ハイトスペーサーを内側に回すように押し込み、ハイトスペーサーのツメ(内側)を脚座の穴にカチッと音がするまで入れてください。
 - ③ハイトスペーサーと脚座を軽く引っ張り、外れないことを確認してください。
 - ④ハイトスペーサーの下にゴムシートを必ず敷いてください。ゴムシートの縁に乗り上げないように位置をあわせてください。
 - ⑤手元スイッチの表示高さをハイトスペーサー使用時にあわせて切り替えてください。
- ※以降のベッドの組立方法や表示高さの切り替えについての詳細はベッドの「取扱説明書」をご確認ください。

取外方法



- ハイトスペーサーを取り外すときは、ボード、フットパネル、ボトム、頭側・足側フレーム、台車連結管を外し、頭側・足側ベースフレームに脚座が付いた状態で作業を行ってください。ベッドを分解せずに取り外しを行うと、思わぬけがや破損の原因となります。(ベッドの分解方法は、ベッドの「取扱説明書」を参照してください。)
- 台車連結管を取り外すときは、台車連結管を持ちながら作業してください。落下してゆかを傷つけるおそれがあります。

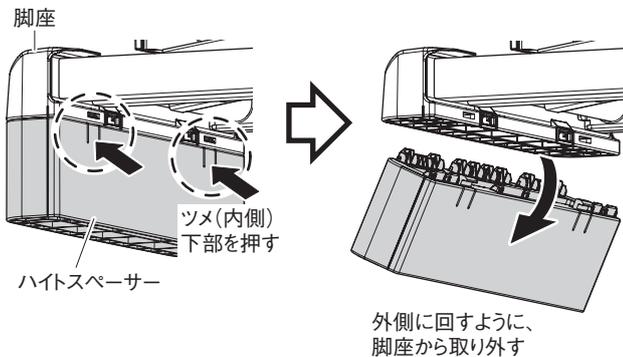

- ①ベースフレームを少し持ち上げてください。
- ②ハイトスペーサーの下に敷いているゴムシートを外してください。
- ③ハイトスペーサーのツメ(内側)下部を押しながら、ハイトスペーサーを外側に回すように、脚座から取り外してください。(4個)
- ④手元スイッチの表示高さを初期状態に戻してください。

※詳細はベッドの「取扱説明書」をご確認ください。

お手入れ・長期保管について


■日常のお手入れ

- 清拭する場合は、水で薄めた中性洗剤にひたした布をよくしぼって拭き、その後水でひたした布をよくしぼって、残った洗剤分を拭き取ってください。最後に乾いた布で残った水分を拭き取ってください。

※揮発性のもの(シンナー、ベンジン、ガソリンなど)やクレゾールは使用しないでください。変色・変質させるおそれがあります。

- 消毒剤を使用する場合は必ず下記の薬品を指定の濃度でご使用ください。

76.9 ~ 81.4%	消毒用エタノール
~ 0.2%	塩化ベンザルコニウム(オスバンなど)
~ 0.2%	塩化ベンゼトニウム(ハイアミンなど)
~ 0.05%	グルコン酸クロルヘキシジン(ヒピテンなど)
~ 0.05%	次亜塩素酸ナトリウム(ミルトンなど)

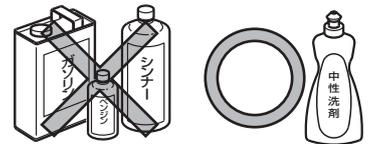

- 洗剤、消毒剤で清拭した場合は、その後水拭きをしてください。水拭きをしないと樹脂部分が割れるおそれがあります。
- ゴムシートには消毒剤は使用しないでください。劣化や変色などのおそれがあります。

Note

- オゾン殺菌器、オートクレーブ滅菌器などには対応できません。

■長期保管する場合

- 高温・多湿・低温・乾燥・ほこりの多い場所を避けてください。
温度 -10 ~ 50°C、湿度 30 ~ 90%RHの環境で保管してください。
- ベッドに取り付けたまま保管する場合は、再使用時にハイトスペーサーが確実に取り付けられていることを確認してください。

仕様

品名		ハイトスペーサー
品番		KQ-PC00A
寸法	本体	長さ 46.7mm × 幅 266.6mm × 高さ 74mm
	ゴムシート	長さ 138mm × 幅 304mm × 高さ 25mm
製品質量 (1個当り)	本体	230g
	ゴムシート	370g
材質	本体	ポリプロピレン
	ゴムシート	ゴム (EPDM)
適合品		楽匠 Fit H タイプ (KQ-C5 ****、KQ-C6 ****、KQ-CA ****) シリーズ

アフターサービスについて

1. 保証書

保証書は、必ず「販売店名・お買い上げ日」などの記入をお確かめになり、記載内容をよくお読みいただき大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

2. 修理を依頼されるとき

修理のご依頼は、お買い上げの販売店または弊社製品の修理受付窓口であるパラテクノコールセンター（下記参照）までご連絡ください。

■連絡していただきたい内容

- 品名、品番（下記保証書を参照）
- お買い上げ日
- 破損または異常の内容（できるだけ詳しく）
- お名前、ご住所および電話番号

■保証期間内は

保証書の記載内容に基づき無償で修理いたします。ただし、保証期間内でも修理が有償になる場合があります。詳しくは保証書をご覧ください。

■保証期間が過ぎているときは

修理により使用できる製品については、ご要望により有償で修理いたします。

3. アフターサービスについてご不明な場合

お買い上げの販売店、またはパラテクノコールセンターまでお問い合わせください。

パラテクノコールセンター ☎ 0120-54-8639

受付時間：平日8:00～18:00 / 土・日・祝日9:00～17:00（年始は休業いたします）

【パラテクノ株式会社について】

弊社製品の修理や保守点検などの各種サービスを実施する、弊社100%出資の会社です。

保証書

品名 / 品番	ハイトスパーサー / KQ-PC00A	保証期間	★お買い上げ日	年	月	日より1年間
お客様	お名前	★販売店	☎ ()			
	〒 () ご住所					

★印欄の情報が確認できない場合は無効となりますので必ずご確認ください。
この保証書は、本書の記載内容に基づき無償修理を行うことをお約束するものです。お買い上げ日から上記保証期間中に、取扱説明書、ラベルなどの注意書きに従った正しい使用状態で故障した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

【保証規定】

- 保証期間内（お買い上げの日より1年間）に、正常なご使用状態において故障した場合は、無償で修理いたします。
- 次のような場合は、保証期間内でも修理は有償となります。
 - 使用上の誤り、あるいは不当な改造や修理による故障および損傷
 - 弊社が指定する適合品以外の製品と組合せて使用したことによる故障および損傷
 - お買い上げ後の移動、設置、落下、あるいは輸送による故障および損傷
 - 火災、煙害、異常電圧および地震、雷、風水害、その他、天災地変などによる故障および損傷
 - 保証書のご提示がない場合
 - 本保証書の保証期間および販売店名の未記入、あるいは字句を書き換えられた場合
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
 - This warranty is valid only in Japan.
- 本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

<パラマウントベッド株式会社>

本社	〒136-8670	東京都江東区東砂2丁目14番5号	☎(03)3648-1111 (代)
東京支店	〒136-8670	東京都江東区東砂2丁目14番5号	☎(03)3648-1171 (代)
札幌支店	〒060-0062	札幌市中央区南2条西13丁目318番地11	☎(011)271-1181 (代)
仙台支店	〒984-0015	仙台市若林区卸町2丁目3番地の3	☎(022)239-5211 (代)
さいたま支店	〒336-0967	さいたま市緑区美園3丁目23番1	☎(048)878-0100 (代)
横浜支店	〒194-0004	東京都町田市鶴間5丁目3番33号	☎(042)795-8800 (代)
名古屋支店	〒461-0001	名古屋市東区泉1丁目20番17号	☎(052)963-0600 (代)
大阪支店	〒550-0001	大阪市西区土佐堀2丁目3番33号	☎(06)6443-8791 (代)
高松営業所	〒761-8031	高松市郷東町223番1	☎(087)881-8900 (代)
広島支店	〒733-0011	広島市西区横川町3丁目8番5号	☎(082)293-1311 (代)
福岡支店	〒812-0013	福岡市博多区博多駅東3丁目14番20号	☎(092)461-1131 (代)

2025-02

製版：株式会社ハル