

KQ-PC00D

保証書付

マットレスストッパー 楽匠Fitシリーズ専用

まえがき

このたびは、マットレスストッパーをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

この「取扱説明書」には、マットレスストッパーを安全にお使いいただくための注意事項と使用方法などを記載しています。

●マットレスストッパーをお使いになる前に、必ずこの「取扱説明書」、マットレスストッパーを取り付けるベッド（楽匠Fitシリーズ<KQ-C*****>）の「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全な取扱方法を理解してください。

●ベッドで療養する方ばかりでなく、介護する方もこの「取扱説明書」、ベッドの「取扱説明書」をよくお読みください。

●この「取扱説明書」はお読みになった後も、いつでも見られる場所に保管してください。

●お買い上げの製品は、改良などにより、この「取扱説明書」の内容と一部異なる場合があります。


●動作範囲・寸法・角度・質量などの数値の記載がある場合、その数値には多少の誤差が含まれます。特別なものを除きこの「取扱説明書」では、表示を見やすくするため、約・およそといった言葉を省略しております。

●ご不明な点がありましたら、お買い上げの販売店または直接弊社までお問い合わせください。

使用目的

■このマットレスストッパーは、ベッドの足側にある取付穴に取り付けて適合のエアマットレスのずれを防ぐことを目的に作られています。

各部の名称と部品の確認

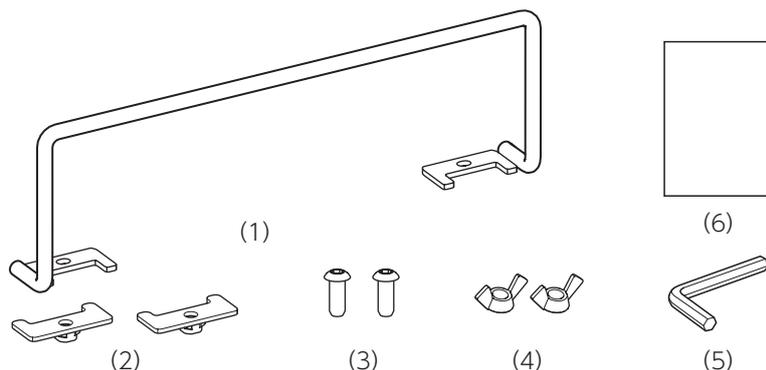

(1)	本体×1
(2)	取付金具×2
(3)	ボルト×2
(4)	蝶ナット×2
(5)	六角レンチ (対辺4mm) ×1
(6)	取扱説明書×1

仕様

品名		マットレスストッパー
品番		KQ-PC00D
主要寸法 (奥行×幅×高さ) (cm)	本体	4.4×33.8×10.9
	取付金具	2.2×4.8×0.8
製品質量 (kg)		0.5
材質		スチール
適合品	ベッド	楽匠Fitシリーズ (KQ-C*****) ※フットパネル (KQ-PC0*C) 使用時
	エアマットレス	こちあ利楽 (清拭・通気) こちあ利楽flow (清拭・通気)

本書に記載されているマークについて

Note	特に重要な内容や間違いやすい内容、注意点などを記載していることを示しています。
	ベッドの方向 (足側) を示しています。

安全に使用するための注意事項



けい
こく
警 告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、死亡または重傷（骨折・圧迫・麻痺^{まひ}など）を負う可能性が想定される内容を示しています。

■ マットレスストッパーを使用する場合、適合品のベッドにフットパネル (KQ-PC0*C) を取り付けてください。

- 指定以外の製品や他社製品と組み合わせると、意図せぬすき間の発生や製品どうしの接触、安定性の低下などにより、けがをしたりマットレスストッパーが破損したりするおそれがあります。適合品については、仕様をご確認ください。
- 組み合わせる使用するベッドの取扱説明書に従って正しくご使用ください。

■ 適合マットレス以外のマットレスと組み合わせて使用しないでください。

- 指定以外の製品や他社製品と組み合わせると、意図せぬすき間の発生やマットレス上面からマットレスストッパーが飛び出して、けがをするおそれがあります。適合マットレスについては、仕様をご確認ください。
- 組み合わせる使用するマットレスの取扱説明書に従って正しくご使用ください。

■ 修理・改造はしないでください。

- 意図せぬすき間の発生などにより、けがをするおそれがあります。

■ マットレスストッパーが、指定の取付位置に確実に固定されていることを確認してください。

- マットレスストッパーの取り付けが不完全（がたつくなど）な場合、不意に外れ、マットレスがずれて、転落・転倒などによるけがのおそれがあります。

■ マットレスストッパーの上に直接座らないでください。

- 転倒・転落して、けがをするおそれがあります。
- 破損・変形するおそれがあります。

■ マットレスストッパーとボトムの上に腕などをいれないでください。

- けがをするおそれがあります。

■ 破損・変形したら使用を中止してください。

- 思わぬけがをするおそれがあります。破損・変形した場合は、お買い上げの販売店またはパラテクノコールセンター（裏表紙参照）に修理（交換）を依頼してください。

■ 体位を自分で保持できない方は使用しないでください。

- 転落・転倒して、けがをするおそれがあります。



ちゅう
い
注 意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が軽傷（打撲・すり傷・切り傷など）を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

■ マットレスストッパーの角に注意してください。

- 足などをぶつけて、けがをするおそれがあります。

■ マットレスストッパーを持ってベッドを移動しないでください。

- マットレスストッパーやボトムに大きな力がかかり、破損・変形するおそれがあります。

■ マットレスストッパーに加湿器などの蒸気を直接当てないでください。

- マットレスストッパーが破損・変形するおそれがあります。水分などが付いた場合は、乾いたタオルなどですみやかに拭き取ってください。

■ 火気に近づけないでください。

- マットレスストッパーの近くでストーブなどの熱器具を使用しないでください。変質・変形するおそれがあります。

■ スプレータイプの殺虫剤を、マットレスストッパーに直接噴射しないでください。

- 殺虫剤に含まれる溶剤によって、マットレスストッパーが破損・変色・溶解するおそれがあります。また、破損・溶解した部分で思わぬけがをするおそれがあります。

取付手順・取外手順



けい 告
こく

■ マットレスストッパーは正しく取り付け、ボルトと固定金具を確実に締め付けてください。


- 間違った取り付けかたをすると、意図せぬすき間が発生して、身体の一部がはさまれてけがをするおそれがあります。
- 間違った取り付けかたをすると、マットレスストッパーががたつくなどして不意に外れ、マットレスがずれて転落・転倒し、けがをするおそれがあります。

取付手順


Note

- ベッドのボトムがレギュラーやミニの場合のみ、取り付けることができます。ロングの場合は取り付けできません。
- マットレスストッパーを取り付けた後に、フットパネル (KQ-PC0*C) をフットパネルの取扱説明書を参照して取り付けてください。
- マットレス止め (足側) を取り付けている場合は、ベッドの取扱説明書を参照して取り外してください。
※取り外したマットレス止め (足側) は、なくさないように保管してください。


<レギュラー取付位置>

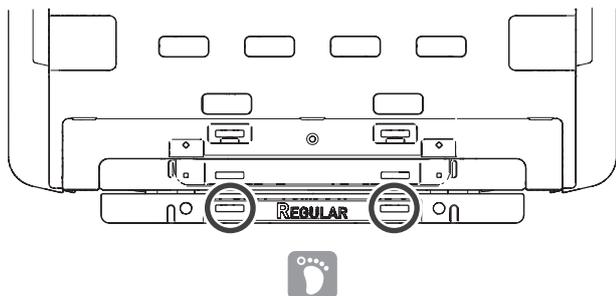

<ミニ取付位置>

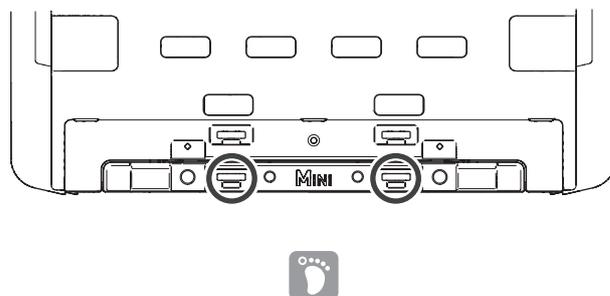


■ 図はレギュラーに取り付ける場合で説明しています。ミニに取り付けるときは、<ミニ取付位置>の図と、下図を参考にして取り付けてください。

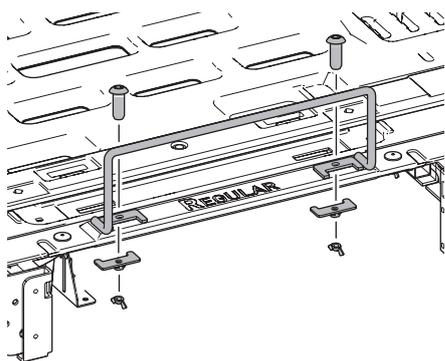

- ① 上図を参照して、取付位置にマットレスストッパーを置く。
- ② 取付金具のナット部分を下に向け、ボトムの裏側から位置を合わせる。
- ③ ボルトをマットレスストッパーの上から差し込む。(2ヶ所)
- ④ 付属の六角レンチでしっかりと締め付ける。(2ヶ所)
- ⑤ マットレスストッパーが確実に取り付けられ、がたつきなどがないことを確認する。
- ⑥ ボルト先端の保護のために蝶ナットをしっかりと締め付ける。(2ヶ所)

<裏側から見た図>

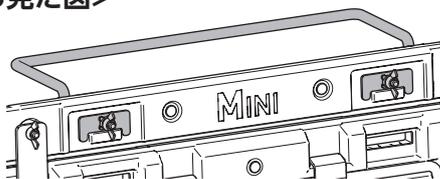

取外手順

取付手順と逆の手順で取り外す。

日常のお手入れ・長期保管について

■日常のお手入れ

- 汚れを落とす場合は、水で薄めた中性洗剤にひたした布をよくしぼって拭き、その後水にひたした布をよくしぼって、残った洗剤分を拭き取ってください。最後に乾いた布で残った水分を拭き取ってください。
- 消毒剤を使用する場合は必ず下記の薬品を指定の濃度でご使用ください。

76.9～81.4%	消毒用エタノール
～0.2%	塩化ベンザルコニウム (オスバンなど)
～0.2%	塩化ベンゼトニウム (ハイアミンなど)
～0.05%	グルコン酸クロルヘキシジン (ヒビテンなど)
～0.05%	次亜塩素酸ナトリウム (ミルトンなど)

Note オゾン殺菌器、オートクレーブ滅菌器などには対応できません。

■長期保管する場合

- 高温・多湿・低温・乾燥・ほこりの多い場所を避けてください。温度-10～50℃、湿度30～90%RHの環境で保管してください。
- 取扱説明書を紛失しないよう、大切に保管してください。

アフターサービスについて

1. 保証書

保証書は、必ず「販売店名・お買い上げ日」などの記入をお確かめになり、記載内容をよくお読みいただき大切に保管してください。保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

販売店名・お買い上げ日の記入がない場合は、品番・販売店・お買い上げ日が確認できるように、製品をお買い上げの領収書などを保証書と一緒に保管してください。

2. 修理を依頼される時

修理のご依頼は、お買い上げの販売店または弊社製品の修理受付窓口であるパラテクノコールセンター（下記参照）までご連絡ください。

■連絡していただきたい内容

- 品名、品番、製品識別表示ラベルの番号（ラベルの貼付位置は表紙「各部の名称と部品の確認」を参照）
- お買い上げ日 ●破損または異常の内容(できるだけ詳しく) ●お名前、ご住所および電話番号

■保証期間内は

保証書の記載内容に基づき無償で修理いたします。ただし、保証期間内でも修理が有償になる場合があります。詳しくは保証書をご覧ください。

■保証期間が過ぎているときは

修理により使用できる製品については、ご要望により有償で修理いたします。

3. 部品の最低保有年数は

弊社では、この製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）の最低保有期間を製造打ち切り後8年としております。

4. アフターサービスについてご不明な場合

お買い上げの販売店、またはパラテクノコールセンターまでお問い合わせください。

パラテクノコールセンター ☎0120-54-8639

受付時間：平日8:00～18:00 / 土・日・祝日9:00～17:00 (年始は休業いたします)

【パラテクノ株式会社について】 弊社製品の修理や保守点検などの各種サービスを実施する会社です。

保証書

品名 / 品番	マットレストッパー / KQ-PC00D	保証期間	★お買い上げ日	年	月	日より1年間
お客様	お名前	★販売店 (店名・住所)	☎	()		
	〒					
	ご住所					

★印欄の情報が確認できない場合は無効となりますので販売店から発行された★印欄の情報が確認できる領収書などを、本保証書と一緒に大切に保管してください。
この保証書は、本書の記載内容に基づき無償修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から上記保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書きに従った正しい使用状態で故障した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
※本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

【保証規定】

- 保証期間内（お買い上げの日より1年間）に、正常なご使用状態において故障した場合は、無償で修理いたします。
- 次のような場合は、保証期間内でも修理は有償となります。
 - 使用上の誤り、あるいは不当な改造や修理による故障および損傷
 - 弊社が指定する適合品以外の製品と組み合わせて使用したことによる故障および損傷
 - お買い上げ後の移動、設置、落下あるいは輸送による故障および損傷
 - 火災、煙害、異常電圧および地震、雷、風水害、その他、天災地変などによる故障および損傷
 - 保証書のご提示がない場合
 - 本保証書の保証期間および販売店名が確認できない場合
 - 字句を書き換えるなどの不正行為が発覚した場合
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
● This warranty is valid only in Japan.

<パラマウントベッド株式会社>

本社 〒136-8670 東京都江東区東砂 2 丁目 14 番 5 号 ☎(03)3648-1111(代)
東京支店 〒136-8670 東京都江東区東砂 2 丁目 14 番 5 号 ☎(03)3648-1171(代)
札幌支店 〒060-0062 札幌市中央区南 2 条西 13 丁目 318 番地 11 ☎(011)271-1181(代)
仙台支店 〒984-0015 仙台市若林区卸町 2 丁目 3 番地の 3 ☎(022)239-5211(代)
さいたま支店 〒336-0967 さいたま市緑区美園 3 丁目 23 番 1 ☎(048)878-0100(代)
横浜支店 〒194-0004 東京都町田市鶴岡 5 丁目 3 番 33 号 ☎(042)795-8800(代)

名古屋支店 〒461-0001 名古屋市東区泉 1 丁目 20 番 17 号 ☎(052)963-0600(代)
大阪支店 〒550-0001 大阪市西区土佐堀 2 丁目 3 番 33 号 ☎(06)6443-8791(代)
高松営業所 〒761-8031 高松市郷東町 2 2 3 番 1 ☎(087)881-8900(代)
広島支店 〒733-0011 広島市西区横川町 3 丁目 8 番 5 号 ☎(082)293-1311(代)
福岡支店 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 3 丁目 14 番 20 号 ☎(092)461-1131(代)