

## KQ-P731

# 脚座カーペット

### まえがき

このたびは、脚座カーペットをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

この「取扱説明書」には、脚座カーペットを安全にお使いいただくための注意事項と使用方法などを記載しています。

- 脚座カーペットをご使用になる前に、必ずこの「取扱説明書」およびベッド本体の「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全な取扱方法を理解してください。
- この「取扱説明書」はお読みになった後も、いつでも見られる場所に保管してください。
- お買い上げの製品は改良などにより、この「取扱説明書」の内容と一部異なる場合があります。
- ご不明な点がございましたら、お買い上げの販売店または直接弊社までお問い合わせください。

## 使用目的

■ベッドの脚座などによるゆかの傷つきを予防することを目的に作られています。

## 安全に使用するための注意事項



けい こく  
**警告**

この表示を無視して誤った取扱いをすると、死亡または重傷（骨折・圧迫・麻痺など）を負う可能性が想定される内容を示しています。

■脚座カーペットと組合せて使用するベッドなどは  
弊社が指定する適合品を使用してください

- 適合品以外の製品や他社製品と組合せると、思わぬけがをするおそれがあります。

■お客様による修理・改造はしないでください

- 思わぬけがや破損の原因となります。

■火気に近づけないでください

- 脚座カーペットの近くでストーブなどの熱器具を使用しないでください。変質・変形・発火などの原因となります。

■キャスターを取付けたベッドには使用しないでください

- ベッドが滑り、転倒などしてけがをするおそれがあります。




ちゅう い  
**注意**

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が軽傷（打撲・すり傷・切り傷など）を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

■スプレータイプの殺虫剤を脚座カーペットに直接噴射しないでください

- 殺虫剤に含まれる溶剤によって脚座カーペットが破損するおそれがあります。また、破損した部分で思わぬけがをするおそれがあります。

## 使用方法

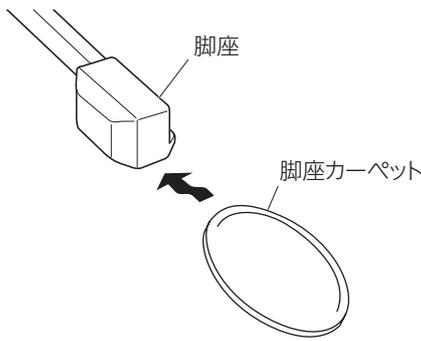

- ベッドの組立後、ベッドのフレームを持って脚座の下に脚座カーペットを差込み、脚座が脚座カーペットの縁に乗りあげないように位置をあわせてください。(4ヶ所)



- 手や足がはさまれないように十分に注意して作業を行ってください。
- ゆか材によってはゆかに脚座カーペットの色が移る場合がありますのでご注意ください。



- 脚座カーペットが確実に設置され、ベッドが安定していることを確認してください。安定しない状態で使用すると、思わぬけがや破損の原因となります。

## 仕様

品名	脚座カーペット (4枚セット)	
品番	KQ-P731	
製品質量	約120g (1枚)	
材質	表地	原着ポリプロピレン (パイル地)
	裏地	PVC (ポリ塩化ビニル) + ガラス不織布
適合品	楽匠プラスシリーズ (Xタイプ)、レントシリーズ、KQ-B6000 シリーズ、INTIME1000 シリーズ、INTIME7000 シリーズ、Active Sleep BED (RA-3 * 50 * /RA-3 * 70 *)	

## お手入れ・長期保管について

### ■日常のお手入れ

- 洗剤で清拭する場合は、下記の手順で行ってください。
  - ①水で薄めた中性洗剤にひたした布をよくしぼって拭いてください。
  - ②水でひたした布をよくしぼって、残った洗剤分を拭き取ってください。
  - ③乾いた布で残った水分を拭き取ってください。



- 揮発性のもの(シンナー、ベンジン、ガソリンなど)やクレゾール・塩素系の洗剤は使用しないでください。変色・変質するおそれがあります。

### ■長期保管する場合

- 高温・多湿・低温・乾燥・ほこりの多い場所を避けてください。  
温度 - 10 ~ 50℃、湿度 30 ~ 90% RH の環境で保管してください。

### ■アフターサービスについてご不明な場合

お買い上げの販売店、またはパラテクノコールセンターまでお問い合わせください。

パラテクノコールセンター ☎0120-54-8639

受付時間：平日 8:00 ~ 18:00 / 土・日・祝日 9:00 ~ 17:00 (年始は休業いたします)

### 【パラテクノ株式会社について】

弊社製品の修理や保守点検などの各種サービスを実施する会社です。

#### <パラマウントベッド株式会社>

本社 〒136-8670 東京都江東区東砂 2丁目14番5号 ☎(03)3648-1111(代)  
東京支店 〒136-8670 東京都江東区東砂 2丁目14番5号 ☎(03)3648-1171(代)  
札幌支店 〒060-0062 札幌市中央区南2条西13丁目318番地11 ☎(011)271-1181(代)  
仙台支店 〒984-0015 仙台市若林区卸町2丁目3番地の3 ☎(022)239-5211(代)  
さいたま支店 〒336-0967 さいたま市緑区美園 3丁目23番1 ☎(048)878-0100(代)  
横浜支店 〒194-0004 東京都町田市鶴間 5丁目3番33号 ☎(042)795-8800(代)

名古屋支店 〒461-0001 名古屋市東区泉 1丁目20番17号 ☎(052)963-0600(代)  
大阪支店 〒550-0001 大阪市西区土佐堀 2丁目3番33号 ☎(06)6443-8791(代)  
高松営業所 〒761-8031 高松市郷東町 223番1 ☎(087)881-8900(代)  
広島支店 〒733-0011 広島市西区横川町 3丁目8番5号 ☎(082)293-1311(代)  
福岡支店 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 3丁目14番20号 ☎(092)461-1131(代)