

KQ-PC00V

保証書付

IVポールホルダー 楽匠Fitシリーズ専用

まえがき

このたびは、IVポールホルダーをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。


この「取扱説明書」には、IVポールホルダーを安全にお使いいただくための注意事項と使用方法などを記載しています。

- IVポールホルダーをお使いになる前に、必ずこの「取扱説明書」、IVポールホルダーを取り付けるベッド（楽匠Fitシリーズ<KQ-C****>）の「取扱説明書」およびIVポール（KC-56：別売）の「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全な取扱方法を理解してください。
- ベッドで療養する方ばかりでなく、介護する方もこの「取扱説明書」、ベッドの「取扱説明書」およびIVポールの「取扱説明書」をよくお読みください。
- この「取扱説明書」はお読みになった後も、いつでも見られる場所に保管してください。
- お買い上げの製品は、改良などにより、この「取扱説明書」の内容と一部異なる場合があります。
- 動作範囲・寸法・角度・質量などの数値の記載がある場合、その数値には多少の誤差が含まれます。特別なものを除きこの「取扱説明書」では、表示を見やすくするため、約・およそといった言葉を省略しております。
- ご不明な点がありましたら、お買い上げの販売店または直接弊社までお問い合わせください。

使用目的

■このIVポールホルダーは、ベッドの樹脂ボードに取り付けてIVポールを使用することを目的に作られています。

各部の名称と部品の確認

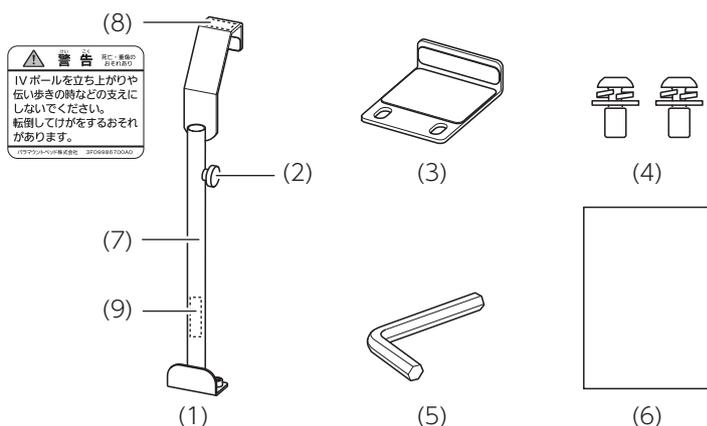

| | |
|-----|------------------|
| (1) | 本体×1 |
| (2) | 固定ノブ×1 |
| (3) | 取付金具×1 |
| (4) | 固定ボルト×2 |
| (5) | 六角レンチ（対辺5mm）×1 |
| (6) | 取扱説明書×1 |
| (7) | IVポール受パイプ |
| (8) | 安全ラベル |
| (9) | 製品識別表示ラベル（背面に貼付） |

仕様

| 品名 | | IVポールホルダー |
|-----------------------|-----------|--|
| 品番 | | KQ-PC00V |
| 主要寸法 （奥行×幅×高さ）（cm） | 本体 | 11.5×7.5×53.3 |
| | 取付金具 | 9.4×7.5×2.8 |
| 製品質量（kg） | | 1.5 |
| 材質 | IVポールホルダー | スチール |
| | 取付金具 | スチール |
| | 固定ノブ | スチール、ポリプロピレン |
| | 固定ボルト | スチール |
| 適合品 | ベッド | 楽匠Fitシリーズ（KQ-C****1*、KQ-C****2*、KQ-C****B*、KQ-C****C*、KQ-C****G*、KQ-C****H*） ※棚ユニットを取り付けているときは、棚ユニットを取り付けていない側のボードに本製品を取り付けてください。 |
| | IVポール | KC-56 |

本書に記載されているマークについて

| | |
|--|---|
|  Note | 特に重要な内容や間違えやすい内容、注意点などを記載していることを示しています。 |
|--|---|

安全に使用するための注意事項



けい 告
こく 告


この表示を無視して誤った取り扱いをすると、死亡または重傷（骨折・圧迫・麻痺など）を負う可能性が想定される内容を示しています。

■IVポールホルダーと組み合わせて使用するベッドおよびIVポールは弊社が指定する適合品をご使用ください

- 指定以外の製品や他社製品と組み合わせると、意図せぬすき間の発生や製品同士の接触、安定性の低下などにより、けがをしたり、IVポールホルダーが破損するおそれがあります。
- IVポールホルダーは、ベッドのボードに取り付けてください。
- IVポールホルダーには、IVポールを取り付けてください。

■IVポールを立ち上がりや伝い歩きするときなどの支えにしないでください

- IVポールが抜けたり破損した場合に、転倒してけがをするおそれがあります。

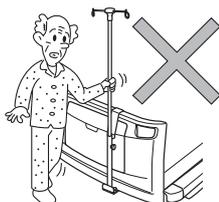

■IVポールホルダーやIVポールの凸部に衣類などが絡まないように注意してください

- 衣類などが引っ張られるなどして、けがをするおそれがあります。

■IVポールホルダーにIVポールを取り付けるときは、ベッドのボードストッパーのロックが掛かっていることを確認してください

- ボードが不意に外れ、けがをするおそれがあります。

■IVポールの広げたフック部分に注意してください

- ベッドをご使用の方や介護される方の顔や目に当たって、けがをするおそれがあります。

■IVポールのフックに最大積載質量（各フック1kg）を超えるものをつりさげないでください

- IVポールのフックが破損して落下し、けがをするおそれがあります。
- IVポールホルダーやIVポールに大きな力がかかり、破損・変形するおそれがあります。

■火気に近づけないでください


- IVポールホルダーやベッドの近くで、ストーブなどの熱器具を使用しないでください。変質・変形・火災などのおそれがあります。

■ベッドを移動するときは、IVポールを持たないでください

- IVポールホルダーやIVポールが破損して、けがをするおそれがあります。
- IVポールホルダーやIVポールに大きな力がかかり、破損・変形するおそれがあります。

■IVポールを使用しないときはIVポールホルダーをベッドから取り外してください

- IVポール受パイプに不意に手指などが入り、けがをするおそれがあります。
- 凸部に衣類などが引っ掛かるなどして、けがをするおそれがあります。

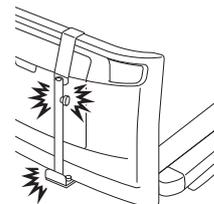

■IVポールホルダーに足を掛けたり、乗ったりしないでください

- 転落・転倒してけがをしたり、ベッドやIVポールホルダーが破損・変形するおそれがあります。

■お客様による修理・改造はしないでください

- 思わぬけがや破損するおそれがあります。

■破損したら使用を中止してください

- IVポールが適切に固定できず、けがをするおそれがあります。破損した場合はすぐに使用を中止し、お買い上げの販売店またはパラテクノコールセンター（裏表紙参照）まで修理をご依頼ください。

■ベッドのラクリアモーション操作をするときは、輸液バッグの位置やチューブ（ドレイン）などの長さに注意してください（ラクリアモーション機能付きベッドのみ）

- ラクリアモーション操作時にIVポールも傾くことで、輸液バッグが傾いたりチューブ（ドレイン）などが引っ張られたり抜けたりして、思わぬけがをするおそれがあります。
- IVポールを最も長く伸ばして使用した場合、IVポールの上端が30cm足方向にずれますので、接触など十分注意してください。



ちゅう い
注 意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が軽傷（打撲・すり傷・切り傷など）を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

■下記のベッド操作のときは、ベッドやIVポール、IVポールホルダーが構造物などに当たらないように、IVポールホルダーに取り付けたIVポールの動きに注意してください

- 家具備品、構造物が破損・変形するおそれがあります。
- 高さ調節操作で上下に43.5cm、ラクリアモーション操作で上下に80cm動きます。
- ラクリアモーション操作をするとIVポールも傾きます。IVポールを最も長く伸ばして使用した場合、IVポールの上端が30cm足方向にずれます。


■スプレータイプの殺虫剤をIVポールホルダーに直接噴射しないでください

- 殺虫剤に含まれる溶剤によってIVポールホルダーが破損するおそれがあります。また、破損した部分で思わぬけがをするおそれがあります。

取付手順

※イラストはボードの内側から見た状態で説明しています

取り付けができる範囲

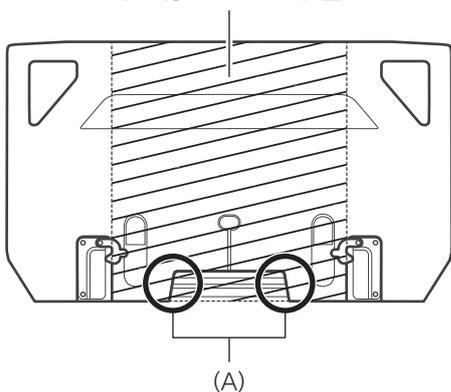

●IVポールホルダーは、ベッドのボードの外側に取り付けが可能です。取り付けができる範囲は左図の斜線部分となります。

※収納カバーがあるボードに取り付けた場合は、収納カバーが使えなくなります。棚ユニットを取り付けたボードには取り付けできません。


※お使いになる方の状況や、環境にあわせて、IVポールホルダーの取付位置を決めてください。

※ボード下部の段差部分 (A)にまたがらないように、取付位置を決めてください。



けい
こく
警告

●IVポールホルダーは、取付範囲以外に取り付けしないでください。意図せぬすき間の発生や、安定性の低下などにより、けがをするおそれがあります。

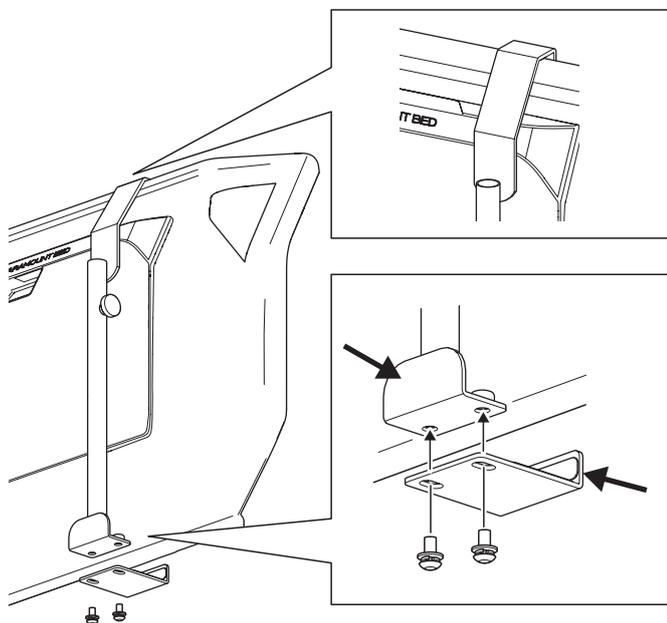

①IVポールホルダーの上側の金具をしっかりとボード上部に引っ掛ける。

②取付金具をまっすぐに取り付け、ボードの内側にすき間のないように引っ掛けて、IVポールホルダーと穴の位置をあわせる。

③固定ボルトを取付金具の下側から差し込んで、付属の六角レンチでしっかりと締め付ける。(2ヶ所)

Note


固定ボルトを締め付けた後、取付金具がしっかりと固定されていることを確認してください。また、IVポールホルダーにがたつきがないことを確認してください。

IVポール (別売) の取付手順



けい
こく
警告

●IVポールを取り付けるときは、ベッドのボードストッパーのロックが掛かっていることを確認してください。ボードが不意に外れ、けがをするおそれがあります。

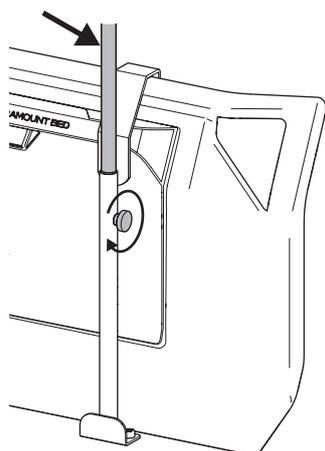

①固定ノブを反時計回りに回し、緩める。

②IVポール受パイプに、IVポールを差し込む。

③固定ノブを時計回りに回し、しっかりと締め付ける。

Note

固定ノブを締め付けた後、IVポールが確実に取り付けられ、がたつきがないことを確認してください。

日常のお手入れ・長期保管について

■日常のお手入れ

- 汚れを落とす場合は、水で薄めた中性洗剤にひたした布をよくしぼって拭き、その後水にひたした布をよくしぼって、残った洗剤分を拭き取ってください。最後に乾いた布で残った水分を拭き取ってください。
- 消毒剤を使用する場合は必ず下記の薬品を指定の濃度でご使用ください。
 - 76.9～81.4% 消毒用エタノール
 - ～0.2% 塩化ベンザルコニウム (オスバンなど)
 - ～0.2% 塩化ベンゼトニウム (ハイアミンなど)
 - ～0.05% グルコン酸クロロヘキシジン (ヒビテンなど)
 - ～0.05% 次亜塩素酸ナトリウム (ミルトンなど)

Note

オゾン殺菌器、オートクレーブ滅菌器などには対応できません。

■長期保管する場合

- 高温・多湿・低温・乾燥・ほこりの多い場所を避けてください。温度-10～50℃、湿度30～90%RHの環境で保管してください。
- 取扱説明書を紛失しないよう、大切に保管してください。

アフターサービスについて

1. 保証書

保証書は、必ず「販売店名・お買い上げ日」などの記入をお確かめになり、記載内容をよくお読みいただき大切に保管してください。保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

販売店名・お買い上げ日の記入がない場合は、品番・販売店・お買い上げ日が確認できるように、製品をお買い上げの領収書などを保証書と一緒に保管してください。

2. 修理を依頼される時

修理のご依頼は、お買い上げの販売店または弊社製品の修理受付窓口であるパラテクノコールセンター（下記参照）までご連絡ください。

■連絡していただきたい内容

- 品名、品番、製品識別表示ラベルの番号（ラベルの貼付位置は表紙「各部の名称と部品の確認」を参照）
- お買い上げ日 ●破損または異常の内容（できるだけ詳しく） ●お名前、ご住所および電話番号

■保証期間内は

保証書の記載内容に基づき無償で修理いたします。ただし、保証期間内でも修理が有償になる場合があります。詳しくは保証書をご覧ください。

■保証期間が過ぎているときは

修理により使用できる製品については、ご要望により有償で修理いたします。

3. 部品の最低保有年数は

弊社では、この製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）の最低保有期間を製造打ち切り後8年としております。

4. アフターサービスについてご不明な場合

お買い上げの販売店、またはパラテクノコールセンターまでお問い合わせください。

パラテクノコールセンター ☎0120-54-8639

受付時間：平日8:00～18:00 / 土・日・祝日9:00～17:00（年始は休業いたします）

【パラテクノ株式会社について】弊社製品の修理や保守点検などの各種サービスを実施する会社です。

保証書

| | | | | | | |
|---------|----------------------|-----------------|---------|-----|---|--------|
| 品名 / 品番 | IVポールホルダー / KQ-PC00V | 保証期間 | ★お買い上げ日 | 年 | 月 | 日より1年間 |
| お客様 | お名前 | ★販売店 (店名・住所) | ☎ | () | | |
| | 〒 | | | | | |
| | ご住所 | | | | | |

★印欄の情報が確認できない場合は無効となりますので販売店から発行された★印欄の情報が確認できる領収書などを、本保証書と一緒に大切に保管してください。
この保証書は、本書の記載内容に基づき無償修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から上記保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書きに従った正しい使用状態で故障した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
※本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

【保証規定】

- 保証期間内（お買い上げ日より1年間）に、正常なご使用状態において故障した場合は、無償で修理いたします。
- 次のような場合は、保証期間内でも修理は有償となります。
 - (1) 使用上の誤り、あるいは不当な改造や修理による故障および損傷
 - (2) 弊社が指定する適合品以外の製品と組み合わせて使用したことによる故障および損傷
 - (3) お買い上げ後の移動、設置、落下あるいは輸送による故障および損傷
 - (4) 火災、煙害、異常電圧および地震、雷、風水害、その他、天災地変などによる故障および損傷
 - (5) 保証書のご提示がない場合
 - (6) 本保証書の保証期間および販売店名が確認できない場合
 - (7) 字句を書き換えるなどの不正行為が発覚した場合
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
 - This warranty is valid only in Japan.

<パラマウントベッド株式会社>

本社 〒136-8670 東京都江東区東砂 2 丁目 14 番 5 号 ☎(03)3648-1111(代)
東京支店 〒136-8670 東京都江東区東砂 2 丁目 14 番 5 号 ☎(03)3648-1171(代)
札幌支店 〒060-0062 札幌市中央区南 2 条西 13 丁目 318 番地 11 ☎(011)271-1181(代)
仙台支店 〒984-0015 仙台市若林区卸町 2 丁目 3 番地の 3 ☎(022)239-5211(代)
さいたま支店 〒336-0967 さいたま市緑区美園 3 丁目 23 番 1 ☎(048)878-0100(代)
横浜支店 〒194-0004 東京都町田市鶴岡 5 丁目 3 番 33 号 ☎(042)795-8800(代)

名古屋支店 〒461-0001 名古屋市東区泉 1 丁目 20 番 17 号 ☎(052)963-0600(代)
大阪支店 〒550-0001 大阪市西区土佐堀 2 丁目 3 番 33 号 ☎(06)6443-8791(代)
高松営業所 〒761-8031 高松市郷東町 2 2 3 番 1 ☎(087)881-8900(代)
広島支店 〒733-0011 広島市西区横川町 3 丁目 8 番 5 号 ☎(082)293-1311(代)
福岡支店 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 3 丁目 14 番 20 号 ☎(092)461-1131(代)

2025-02
製版：株式会社 ハル