

KE-551L,553L,557L

延長マットレス

まえがき

このたびは延長マットレスをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

この「取扱説明書」には延長マットレスを安全にお使いいただくための注意事項と使用方法などを記載しています。

●延長マットレスをお使いになる前に、必ずこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全な取扱方法を理解してください。

●延長マットレスを使用する方ばかりでなく、付き添いの方や介護する方もこの「取扱説明書」をよくお読みください。

●この「取扱説明書」は、お読みになった後も、いつでも見られる場所に保管してください。

●お買い上げの製品は、改良などにより、この「取扱説明書」の内容と一部異なる場合があります。

●動作範囲・寸法・角度・質量などの数値の記載がある場合、その数値には多少の誤差が含まれます。特別なものを除きこの「取扱説明書」では、表示を見やすくするため、約・およそといった言葉を省略しております。

●ご不明な点がありましたら、お買い上げの販売店または直接弊社までお問い合わせください。

使用目的

■この製品は長身の方が延長フレームを使用した際に対応するためのマットレスです。レギュラーサイズのプレグラーマットレスと組合せて使用することを目的に作られています。

安全に使用するための注意事項



けい こく
警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、死亡または重傷（骨折・圧迫・麻痺^{まひ}など）を負う可能性が想定される内容を示しています。

■延長マットレスを直接取付けて使用するベッド・延長フレームなどは弊社が指定する適合品をご使用ください

●指定以外の製品や他社製品と組合せると、意図せぬすき間の発生や製品同士の接触・安定性の低下により、けがをしたり故障したりするおそれがあります。

■お客様による修理・改造はしないでください

●思わぬけがや破損の原因となります。

■火気に近づけないでください

●延長マットレスの近くで、ストーブなどの熱器具を使用しないでください。変形・変質・発火などの原因となります。

■延長マットレスの端に手や足、膝などをつかないようにしてください

●支える部分がないため、バランスを崩し転倒して、けがをするおそれがあります。



ちゅう い
注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が軽傷（打撲・すり傷・切り傷など）を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

■マットレス洗浄機やオートクレーブ滅菌器、オゾン殺菌器などで洗浄しないでください

●延長マットレスや洗浄・殺菌設備などが変質・破損・劣化するおそれがあります。

■ひもを足ボトムまたはロングマットレス止めにしぱり付けて使用してください

●使用中ベッドから外れて、けがをするおそれがあります。


仕様

品名		延長マットレス		
品番		KE-551L	KE-553L	KE-557L
寸法 (cm)	幅	91	83	99
	長さ		14	
	厚さ		8	
製品質量 (kg)		0.6	0.5	0.7
材質	側地	ポリエステル 100% (抗菌・難燃)		
	詰め物	ポリエステル 100%		

取付方法


⚠️ 注意

●延長マットレス・ロング用マットレス止めは、ベッドの幅にあったものを使用してください。バランスを崩し転倒して、けがをするおそれがあります。

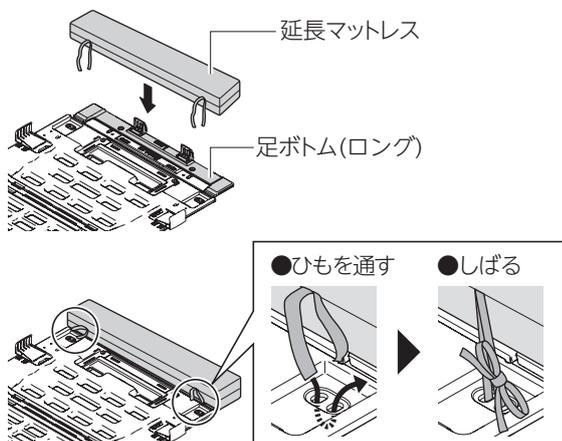

＜楽匠フィットへの取付方法＞

1. ベッドのボトム長さをロングに設定する。
2. マットレス止め(小) をロングボトムに取り付ける。
※ベッドのボトム調整、マットレス止めの取付方法はベッドの取扱説明書を参照してください。
3. 足ボトムの中心に延長マットレスを載せる。
4. 足ボトムにある2つの穴に紐を通してしばり付ける。
(左右2ヶ所)

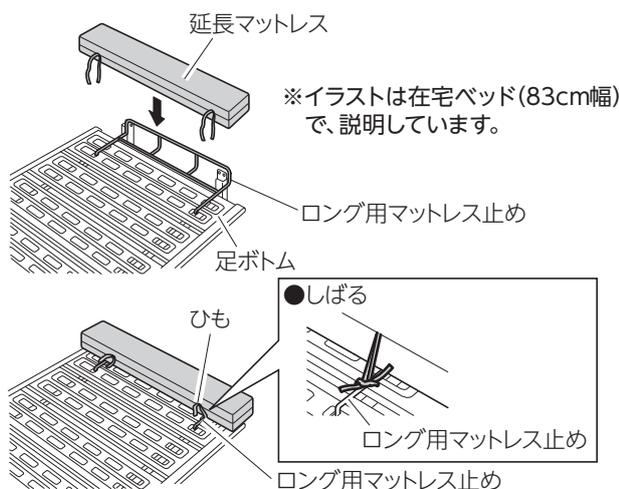

＜ロング用マットレス止めを設置するベッドへの取付方法＞

1. 足ボトムの中心に延長マットレスを載せる。
2. ひもをマットレス止めの両端にしばり付ける。(左右2ヶ所)



●ベッドの取扱説明書を参照し、ロング用マットレス止めを確実にベッドに取り付けてから、延長マットレスを取付けてください。

【適合マットレス】

延長マットレス	適合するレギュラーサイズマットレス	
KE-551L	プレグラーマットレス	KE-551 (91cm幅用) KE-551Q (91cm幅用)
KE-553L	プレグラーマットレス	KE-553 (83cm幅用) KE-553Q (83cm幅用)
KE-557L	プレグラーマットレス	KE-557 (100cm幅用) KE-557Q (100cm幅用)

日常のお手入れ

側地の洗淨



●側地を取外すときおよび取外した後は、側地や詰め物が破損しないように注意して取扱ってください。

- ①側地のファスナーを開け、詰め物を完全に取出してください。
- ②右図の絵表示に従ってください。



中性洗剤使用

- 洗濯機で弱い洗濯処理ができます
- 洗濯の液温は40°Cが限度です
- 中性洗剤を使用してください(蛍光増白剤を含む洗剤は使用しないでください)



- 漂白処理はできません



- 洗濯処理後のタンブル乾燥処理ができます

- 排気温度は60°Cが限界です(低温乾燥)



- 日陰でのつり干し乾燥がよいです



あて布使用

- 底面温度120°Cを限度としてスチームなしでアイロン仕上げ処理ができます
- あて布を使用してください



- ドライクリーニング処理はできません



- 普通操作のウェットクリーニング処理ができます

長期保管について

■長期にわたり、マットレスをご使用にならないときは、下記の点にご注意ください。

●マットレス以外のものを重ねて載せないでください。

●高温・多湿・ほこりの多い場所・直射日光を避けてください。

※詰め物や側地が変色する場合がありますが、製品の性能に問題はありません。

アフターサービスについてご不明な場合

お買い上げの販売店、またはパラテクノコールセンターまでお問い合わせください。

パラテクノコールセンター ☎0120-54-8639

受付時間：平日8:00～18:00 / 土・日・祝日9:00～17:00 (年始は休業いたします)

【パラテクノ株式会社について】

弊社製品の修理や保守点検などの各種サービスを実施する会社です。

<パラマウントベッド株式会社>

本社	〒136-8670	東京都江東区東砂2丁目14番5号	☎(03)3648-1111 (大代)
東京支店	〒136-8670	東京都江東区東砂2丁目14番5号	☎(03)3648-1171 (代)
札幌支店	〒060-0062	札幌市中央区南2条西13丁目318番地11	☎(011)271-1181 (代)
仙台支店	〒984-0015	仙台市若林区卸町2丁目3番地の3	☎(022)239-5211 (代)
さいたま支店	〒336-0967	さいたま市緑区美園3丁目23番1	☎(048)878-0100 (代)
横浜支店	〒194-0004	東京都町田市鶴間5丁目3番33号	☎(042)795-8800 (代)
名古屋支店	〒461-0001	名古屋市東区泉1丁目20番17号	☎(052)963-0600 (代)
大阪支店	〒550-0001	大阪市西区土佐堀2丁目3番33号	☎(06)6443-8791 (代)
高松営業所	〒761-8031	高松市郷東町2-2-3番1	☎(087)881-8900 (代)
広島支店	〒733-0011	広島市西区横川町3丁目8番5号	☎(082)293-1311 (代)
福岡支店	〒812-0013	福岡市博多区博多駅東3丁目14番20号	☎(092)461-1131 (代)



PARAMOUNT BED