

## KE-L113,L111,L117,L123,L121,L127

## 延長マットレス

## まえがき

このたびは延長マットレスをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

この「取扱説明書」には延長マットレスを安全にお使いいただくための注意事項と使用方法などを記載しています。

- 延長マットレスをお使いになる前に、必ずこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全な取扱方法を理解してください。また、ベッド本体および延長フレーム（【適合品】参照）の取扱説明書もあわせてお読みください。
- 延長マットレスを使用する方ばかりでなく、付き添いの方や介護する方もこの「取扱説明書」をよくお読みください。
- この「取扱説明書」は、お読みになった後も、いつでも見られる場所に保管してください。
- お買い上げの製品は、改良などにより、この「取扱説明書」の内容と一部異なる場合があります。
- 動作範囲・寸法・角度・質量などの数値の記載がある場合、その数値には多少の誤差が含まれます。特別なものを除きこの「取扱説明書」では、表示を見やすくするため、約・およそといった言葉を省略しております。
- ご不明な点がございましたら、お買い上げの販売店または直接弊社までお問い合わせください。

## 本書に記載されているマークについて

<b>Note</b>	特に重要な内容や間違えやすい内容、注意点を記載していることを示しています。		マットレス・ベッドの方向（足側）を示しています。
-------------	---------------------------------------	---	--------------------------

## 使用目的

- この製品は長身の方が延長フレームまたはベッドの延長機能を使用した際に対応するためのマットレスです。適合延長フレーム / 適合ベッドと組合せて使用することを目的に作られています。

## 安全に使用するための注意事項

 <b>警告</b>	この表示を無視して誤った取扱いをすると、死亡または重傷（骨折・圧迫・麻痺など）を負う可能性が想定される内容を示しています。
---	---

- 延長マットレスを直接取付けて使用するベッド・延長フレームなどは弊社が指定する適合品をご使用ください
  - 指定以外の製品や他社製品と組合せると、意図せぬすき間の発生や製品同士の接触・安定性の低下により、けがをしたり故障したりするおそれがあります。
- お客様による修理・改造はしないでください
  - 思わぬけがや破損の原因となります。
- 火気に近づけないでください
  - 延長マットレスの近くで、ストーブなどの熱器具を使用しないでください。変形・変質・発火などの原因となります。
- 延長マットレスの端に手や足、膝などをつかないようにしてください
  - 支える部分がないため、バランスを崩し転倒して、けがをするおそれがあります。

 <b>注意</b>	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が軽傷（打撲・すり傷・切り傷など）を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示しています。
---	--

- マットレス洗浄機やオートクレーブ滅菌器、オゾン殺菌器などで洗浄しないでください
  - 延長マットレスや洗浄・殺菌設備などが変質・破損・劣化するおそれがあります。
- ひもを足ボトムまたはマットレス止めにしぼり付けて使用してください
  - 使用中ベッドから外れて、けがをするおそれがあります。

# 仕様

品名		延長マットレス					
品番		KE-L113	KE-L111	KE-L117	KE-L123	KE-L121	KE-L127
寸法 (cm)	幅	83	91	99	83	91	99
	長さ	14					
	厚さ	9.5			12.5		
製品質量 (kg)		0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7
材質	側地	ソフト面	ポリエステル70% ポリウレタン30%(抗菌・防水・難燃)		ポリエステル60% ポリウレタン40%(抗菌・防水・難燃)		
		ハード面	ポリエステル70% ポリウレタン30%(抗菌・防水・難燃)				
	詰め物	ウレタンフォーム(難燃)					
使用環境 / 保管環境		温度: 50℃以下・湿度: 90% RH以下					


## 取付方法

### 注意

●延長フレーム / 延長マットレスは、ベッドの幅にあったものを使用してください。バランスを崩し転倒して、けがをするおそれがあります。


#### Note

●延長マットレスはリバーシブル仕様です。  
品質表示ラベルに面の記載がありますのでご確認の上、取付けてください。

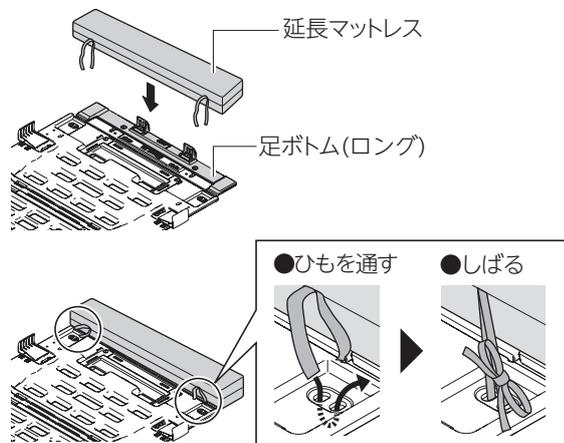

#### <楽匠フィットへの取付方法>

1. ベッドのボトム長さをロングに設定する。
2. マットレス止め (小) をロングボトムに取り付ける。  
※ベッドのボトム調整、マットレス止めの取付方法は  
ベッドの取扱説明書を参照してください。
3. 足ボトムの中心に延長マットレスを載せる。
4. 足ボトムにある2つの穴に紐を通してしばり付ける。  
(左右2ヶ所)

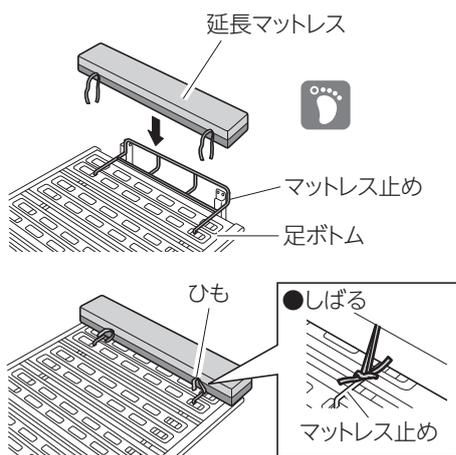

#### <その他ベッドへの取付方法>

1. 足ボトムの中心に延長マットレスを載せる。
2. ひもをマットレス止めの両端にしばり付ける。(左右2ヶ所)

## 取付方法

【適合品】 ご不明な点がございましたら、お買い上げの販売店または直接弊社までお問い合わせください。

延長 マットレス	フレーム / ベッドの幅 (cm)	適合延長フレーム / 適合ベッド	適合マットレス
KE-L113	78	メーティスシリーズ [KA-H5300F]	厚さ 8 ~ 10cm の 弊社マットレス (エアマットレスを除く)
	83	KQ-P68L、メーティスシリーズ [KA-H5 ****] (木製ボードタイプを除く) 楽匠フィットシリーズ [KQ-C **** / KQ-C ****]	
KE-L111	91	KQ-P78L、メーティスシリーズ [KA-H5 ****] (木製ボードタイプを除く) 楽匠フィットシリーズ [KQ-C **** / KQ-C ****]	
KE-L117	99	KQ-P94L	
KE-L123	78	メーティスシリーズ [KA-H5300F]	厚さ 11 ~ 13cm の 弊社マットレス (エアマットレスを除く)
	83	KQ-P68L、メーティスシリーズ [KA-H5 ****] (木製ボードタイプを除く) 楽匠フィットシリーズ [KQ-C **** / KQ-C ****]	
KE-L121	91	KQ-P78L、メーティスシリーズ [KA-H5 ****] (木製ボードタイプを除く) 楽匠フィットシリーズ [KQ-C **** / KQ-C ****]	
KE-L127	99	KQ-P94L	

### Note

- メーティスシリーズ [KA-H5300F] に KE-L113/KE-L123 を取り付ける場合は、足ボトムの幅より、延長マットレスがわずかにみ出します。
- 適合品は、仕様の変更や組合せなどにより変わる場合があります。また、新製品や製品の販売終了により、適合品が記載されていない場合があります。適合品についてご不明な点は、販売店または直接弊社までお問い合わせください。

## 日常のお手入れ



- 揮発性のもの（シンナー・ベンジン・ガソリンなど）は使用しないでください。変色・変質するおそれがあります。
  - 消毒剤を使用する場合は、指定以外の薬品を使用しないでください。側地の劣化や変色が生じるおそれがあります。
  - 詰め物は濡らさないようにしてください。劣化の原因となります。
- 延長マットレスが汚れたり、使用される方が替わったりする際は、必ず延長マットレスの全面を下記の手順（①～④）に従ってお手入れしてください。
- ①汚物があれば除去してください。（血液、便など）
  - ②石鹼水（市販の石鹼、中性洗剤などを水で薄めたもの）で延長マットレスの表面（ひょうめん）の側地を拭き、汚れを落としてください。
  - ③消毒液で延長マットレスの表面（ひょうめん）の側地を清拭消毒してください。  
消毒液は、必ず下記の薬品を、指定の濃度を守って使用してください。また、各消毒液の指示に従って使用してください。
    - ・76.9 ~ 81.4% : 消毒用エタノール
    - ・70% : イソプロパノール
    - ・0.05 ~ 0.2% : 塩化ベンゼトニウム（ハイアミンなど）
    - ・0.05% : グルコン酸クロルヘキシジン（ヒビテンなど）
    - ・0.1 ~ 1.0% : 次亜塩素酸ナトリウム（ピューラックスなど）
  - ④ベッドの上などで自然乾燥させてください。また、天日干しはしないでください。

# 長期保管・アフターサービスについて

■長期にわたり、延長マットレスをご使用にならないときは、下記の点にご注意ください。

- 延長マットレス以外のものを重ねて載せないでください。
- 高温・多湿・ほこりの多い場所、直射日光を避けてください。

※詰め物や側地が変色する場合がありますが、製品の性能に問題はありません。

アフターサービスについてご不明な点は、お買い上げの販売店、またはパラテクノコールセンターまでお問い合わせください。

パラテクノコールセンター ☎0120-54-8639

受付時間：平日 8:00～18:00 / 土・日・祝日 9:00～17:00 (年始は休業いたします)

## 【パラテクノ株式会社について】

弊社製品の修理や保守点検などの各種サービスを実施する会社です。

## <パラマウントベッド株式会社>

本社	〒136-8670	東京都江東区東砂2丁目14番5号	☎(03)3648-1111 (大代)
東京支店	〒136-8670	東京都江東区東砂2丁目14番5号	☎(03)3648-1171 (代)
札幌支店	〒060-0062	札幌市中央区南2条西13丁目318番地11	☎(011)271-1181 (代)
仙台支店	〒984-0015	仙台市若林区卸町2丁目3番地の3	☎(022)239-5211 (代)
さいたま支店	〒336-0967	さいたま市緑区美園3丁目23番1	☎(048)878-0100 (代)
横浜支店	〒194-0004	東京都町田市鶴間5丁目3番33号	☎(042)795-8800 (代)
名古屋支店	〒461-0001	名古屋市東区泉1丁目20番17号	☎(052)963-0600 (代)
大阪支店	〒550-0001	大阪市西区土佐堀2丁目3番33号	☎(06)6443-8791 (代)
高松営業所	〒761-8031	高松市郷東町223番1	☎(087)881-8900 (代)
広島支店	〒733-0011	広島市西区横川町3丁目8番5号	☎(082)293-1311 (代)
福岡支店	〒812-0013	福岡市博多区博多駅東3丁目14番20号	☎(092)461-1131 (代)