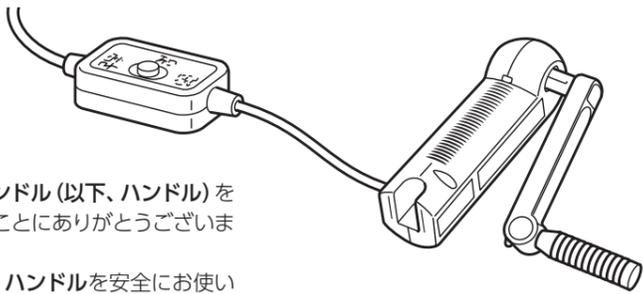


## スマートハンドル

KQ-P70S  
(QP70S)

## まえがき

このたびは、スマートハンドル（以下、ハンドル）をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

この「取扱説明書」には、ハンドルを安全にお使いいただくための注意事項と使いかたなどを記載しています。

- ハンドルをご使用になる前に、必ずこの「取扱説明書」およびベッドの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全な取扱方法を理解してください。
- この「取扱説明書」は、ハンドルと一緒に収納ケースに入れて保管してください。
- お買い上げの製品は、改良などにより、この「取扱説明書」の内容と一部異なる場合があります。
- 動作範囲・寸法・角度・質量などの数値の記載がある場合、その数値には多少の誤差が含まれます。特別なものを除きこの「取扱説明書」では、表示を見やすくするため、約・およそといった言葉を省略しております。
- ご不明な点がありましたら、お買い上げの販売店または直接弊社までお問い合わせください。

## もくじ

- 1.各部の名称と部品の確認 …………… 1
- 2.安全に使用するための注意事項 …… 2～4
- 3.ハンドルの使用準備 …………… 5～6
- 4.ハンドル操作のしかた …………… 7～9
- 5.ハンドルの片付けかた …………… 10～11
- 6.日常のお手入れ・長期保管について …… 12
- 7.故障かな?と思ったら…………… 13
- 8.仕様…………… 13
- 9.収納ケースの取り付けかた・取り外しかた 14～16

## 使用目的について

このハンドルは、災害などによる停電時・ベッドの故障（※1）などの緊急時に、ベッドの背ボトム・膝・足ボトムのあげ・さげ、高さ（頭側さげ）操作（※2）を行うことを目的に作られています。

- ※1) 故障内容によっては、ハンドルによる操作ができない場合があります。
- ※2) 楽匠プラスシリーズ（Xタイプ）・楽匠FeeZシリーズ・レントシリーズ・KQ-60000シリーズ・KQ-B6000シリーズは、高さ（頭側さげ）操作によってベッド全体の高さがさがります。

## 適合品について

このハンドルに適合するベッドは、楽匠フィットシリーズ（Hタイプ）・楽匠プラスシリーズ（Hタイプ/Xタイプ）[KQ-A\*\*\*\*]・楽匠Zシリーズベッド[KQ-7\*\*\*\*]・楽匠FeeZシリーズ[KQ-77\*\*\*/KQ-78\*\*]・レントシリーズ[KQ-68\*\*\*\*]・KQ-60000シリーズ[KQ-6\*\*\*\*]・KQ-B6000シリーズ[KQ-B6\*\*\*\*]・KA-7900シリーズ[KA-79\*\*]です。

7F09722500A3

パラマウントベッド株式会社

## 2 安全に使用するための注意事項

ご使用前に、必ずこの「安全に使用するための注意事項」をよくお読みいただき、正しくお使いください。

ここに示した注意事項は製品を安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、危害や損害の大きさと切迫の程度に応じて「警告」と「注意」の二つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

※取扱説明書をお読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

## 警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、死亡または重傷（骨折・圧迫・麻痺など）を負う可能性が想定される内容を示しています。

## 注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が軽傷（打撲・すり傷・切り傷など）を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

## 警告

ハンドルおよび収納ケースは、弊社が指定する適合品のベッドに取り付けてご使用ください

指定以外の製品や他社製品と組み合わせるとハンドルが不意に動作し、けがをしたりハンドルが破損したりするおそれがあります。

ハンドルをご使用になる前に、本取扱説明書と取り付けるベッドの取扱説明書をよくお読みください

誤った使いかたをすると、思わぬけがをするおそれがあります。

ベッドの電源プラグやハンドルのケーブルのコネクターを、濡れた手で抜き差ししないでください


ショートして感電したり、故障したりするおそれがあります。

ハンドルのケーブルを傷つけないでください

- ケーブルが破損し、感電・火災のおそれがあります。
  - ・ベッドの可動部でケーブルをはさまないようにしてください。
  - ・ケーブルに重いものを置いたり無理な力を加えたりしないようにしてください。
  - ・ベッドでケーブルを踏みつけないでください。
- ハンドルのケーブルが傷んだ場合は、ハンドルを交換してください。

## 1 各部の名称と部品の確認

■開梱後、下記の部品がすべて揃っていること、破損していないことを確認してください。万一、部品の不足や破損があった場合には、販売店または直接弊社までご連絡ください。

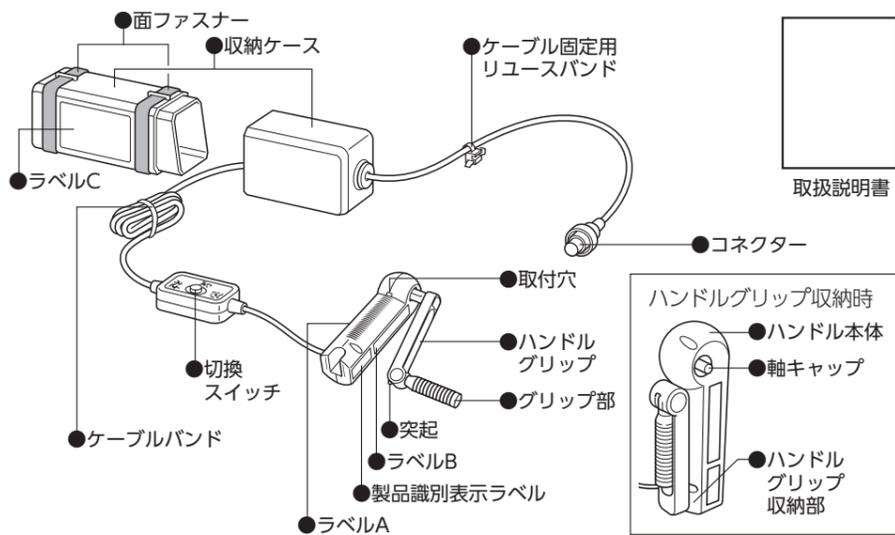


## ラベルについて

ハンドルを使用する方に、特に注意していただきたい項目をラベルにして、ハンドル本体の両面および収納ケースに貼ってあります。傷ついたり、はがしたりしないでください。

## ラベルA




## ラベルB

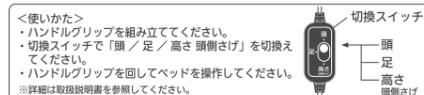

## 製品識別表示ラベル



## ラベルC

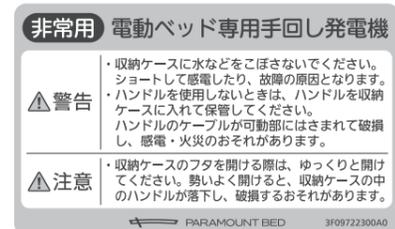

## 2 安全に使用するための注意事項

ハンドル操作を行うときは、ベッドを使用する方の容体にあわせて使用し、治療中の方は医師に相談してください

ベッドを使用する方の容体によっては、ハンドル操作により容体を悪化させる可能性があります。

ベッドのボトム角度の調節や高さ（頭側さげ）調節を行うときは、ベッドを使用する方の状態に注意してください

ベッドを使用する方がボトム角度の調節中や高さ（頭側さげ）（※）調節中に動くと、ベッドから転落したり、すき間にはさまれたりして、けがをするおそれがあります。

※) 楽匠プラスシリーズ（Xタイプ）・楽匠FeeZシリーズ・レントシリーズ・KQ-60000シリーズ・KQ-B6000シリーズは、高さ（頭側さげ）操作によってベッド全体の高さがさがります。

うつ伏せや横向き（仰向け以外）で寝た状態で、ハンドルによるボトム角度の調節は行わないでください

関節を逆に曲げることになり、けがをするおそれがあります。

ベッドやオプションなどのすき間に身体の一部が入った状態で、ハンドル操作をしないでください

- すき間にはさまれて、けがをするおそれがあります。
- 特に、予測できない行動をとると思われる方や体位を自分で保持できない方には十分注意してください。

ベッドのフレームとボトムの間などに手（指）や足などが入った状態でハンドル操作をしないでください

さがってきたボトムとベッドのフレームやボードの間にはさまれて、けがをするおそれがあります。

ベッドの高さ（頭側さげ）操作を行うときは、ベッドの下に足を入れないでください

はさまれて、けがをするおそれがあります。ハンドルで高さ（頭側さげ）（※）操作を行う場合、ベッドの手元スイッチでベッドの高さを下げるときに鳴る警告音が鳴りませんので、ご注意ください。

※) 楽匠プラスシリーズ（Xタイプ）・楽匠FeeZシリーズ・レントシリーズ・KQ-60000シリーズ・KQ-B6000シリーズは、高さ（頭側さげ）操作によってベッド全体の高さがさがります。

お客様による修理・改造はしないでください

思わぬけがをしたり、ハンドルおよびベッドが破損したりするおそれがあります。

火気に近づけないでください

破損・変形・発火などの原因となります。

ハンドルおよび収納ケースに水などをこぼさないでください

ショートして感電したり、故障の原因となります。誤ってこぼしてしまった場合には、ベッドの電源プラグをコンセントから抜いて、販売店またはパラテクノコールセンター（17ページ参照）までご連絡ください。

ハンドルを使用しないときは、ハンドルを収納ケースに入れて保管してください

ハンドルのケーブルが可動部にはさまれて破損し、感電・火災のおそれがあります。

ハンドル操作時は、介護する方の監視下で行い、ベッドを使用する方を背ボトムと膝ボトムの間で圧迫しないように注意してください

けがをするおそれがあります。

**注意**

ハンドル操作時は、周囲を確認してください

- ハンドル操作時に身体が周囲のものにぶつかり、けがをするおそれがあります。
- ベッドの動作によって周囲のものを破損させたり、ベッドが破損・変形したりするおそれがあります。

ハンドル操作時やハンドルグリップの取り付け・取り外し時に、ハンドル本体とハンドルグリップの間に手や指をはさまないように注意してください

けがをするおそれがあります。

ハンドル操作時は、ベッドの電源プラグがコンセントから抜けていることを確認してください

ハンドルとベッドの手元スイッチを同時に操作すると、ベッドが故障するおそれがあります。

スプレータイプの殺虫剤をハンドルや収納ケースに直接噴射しないでください

殺虫剤に含まれる溶剤によって破損・変色・溶解するおそれがあります。また破損・溶解した部分で思わぬけがをするおそれがあります。

ハンドルは磁力を帯びているため、データカードや磁気を利用したクレジットカードなどを近くに置かないでください

データが消失したり、クレジットカードなどが破損したりするおそれがあります。

収納ケースのフタを開けるときは、手がベッドのフレームにぶつからないように気をつけてください

けがをするおそれがあります。

ハンドルが破損・変形した場合は、ただちに使用を中止してください

けがをするおそれがあります。

# 3 ハンドルの使用準備

**注意**


ハンドル操作時は、ベッドの電源プラグがコンセントから抜けていることを確認してください。ハンドルとベッドの手元スイッチを同時に操作すると、ベッドが故障するおそれがあります。

## 1.ハンドルの収納位置について

※楽匠プラスシリーズ (Xタイプ)・楽匠FeeZシリーズ・レントシリーズ・KA-7900シリーズは、収納ケースをベッドのフレームに取り付けなくてください。

ハンドルは収納ケースに入っています。収納ケースは、ベッド足側の足ボトムの下に取り付けられています。

※イラストは楽匠Zシリーズのフットボードを外した状態です。

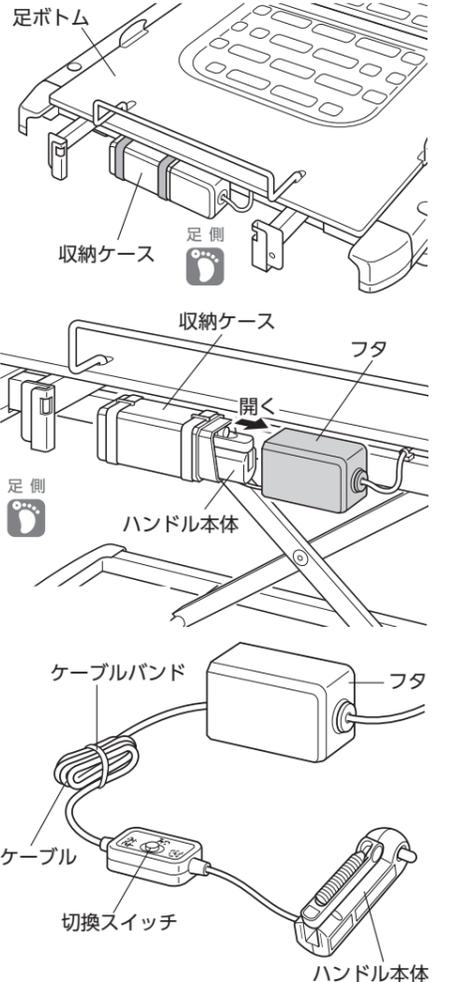

## 2.ハンドルの取り出し方

**注意** 手元が暗い場合は、明かり (懐中電灯など) を使用して作業環境を整えてください。

- 1 ベッドの電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 2 ベッドの取扱説明書を参照して、ベッドのフットボードを取り外してください。
- 3 収納ケースのフタを矢印の方向に開け、収納ケースからハンドル本体、フタからケーブルと切換スイッチを取り出してください。

**注意**

収納ケースのフタを開けるときは、ゆっくりと開けてください。勢いよく開けると、収納ケースの中のハンドルが落下してゆかを傷つけたり、ハンドルが破損・変形したりするおそれがあります。

- 4 ハンドルのケーブルを束ねているケーブルバンドを外してください。

# 3 ハンドルの使用準備

## 3.ハンドルグリップの組み立て方

**注意**


ハンドルグリップを組み立てるときは、ハンドル本体とハンドルグリップの間に手や指をはさまないように注意してください。はさまれてけがをするおそれがあります。

- 1 ハンドル本体の軸キャップを取り外してください。


**注意** 取り外した軸キャップは、紛失しないように保管してください。




- 2 ハンドルグリップをハンドルグリップ収納部から矢印方向に取り外してください。

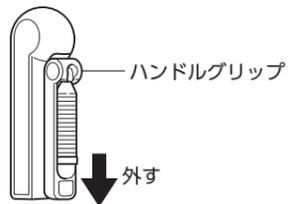

- 3 ハンドルグリップを少し回しながら、ハンドル本体の軸に「カチッ」と音がするまで奥に差し込んでください。

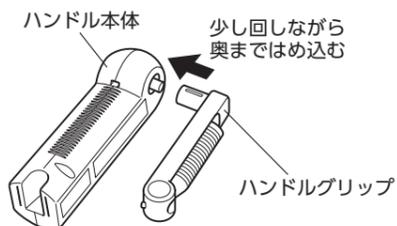

- 4 矢印方向にグリップ部を起こしてください。

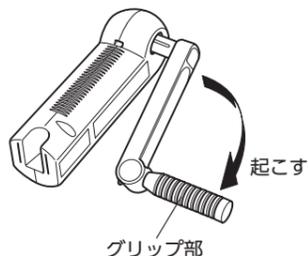

# 4 ハンドル操作のしかた

■ハンドル操作で、背ボトム・膝・足ボトムのあげ・さげ、高さ (頭側さげ) (※) 操作が行えます。  
 ※) 楽匠プラスシリーズ (Xタイプ)・楽匠FeeZシリーズ・レントシリーズ・KQ-60000シリーズ・KQ-B6000シリーズは、高さ (頭側さげ) 操作によってベッド全体の高さがさがります。


**警告**

- ハンドル操作時は、介護する方の監視下で行い、ベッドを使用する方を背ボトムと膝ボトムの間で圧迫しないように注意してください。けがをするおそれがあります。
  - ベッドの可動部でハンドルのケーブルをはさまないようにしてください。ケーブルが破損し、感電・火災のおそれがあります。
  - ベッドの高さ (頭側さげ) (※) 操作を行うときは、ベッドの下に足を入れないでください。はさまれて、けがをするおそれがあります。ハンドルで高さ (頭側さげ) 操作を行う場合、ベッドの手元スイッチでベッドの高さを下げたときに鳴る警告音が鳴りませんので、ご注意ください。  
 ※) 楽匠プラスシリーズ (Xタイプ)・楽匠FeeZシリーズ・レントシリーズ・KQ-60000シリーズ・KQ-B6000シリーズは、高さ (頭側さげ) 操作によってベッド全体の高さがさがります。
- (楽匠フィットシリーズ (Hタイプ)・楽匠プラスシリーズ (Hタイプ) **背・ひざ・高** タイプ・楽匠Zシリーズ・KA-7900シリーズに関して)
- ベッドの足先がさがっている状態で膝・足ボトムのさげ操作をする場合は、高さ (頭側さげ) 操作でベッドを水平な状態にしてから、膝・足ボトムのあげ・さげ操作を行ってください。ベッドを使用する方がベッドから滑り落ちて、けがをするおそれがあります。
  - 切換スイッチを「高さ 頭側さげ」位置にスライドさせた状態で、ハンドルグリップを「時計回り」に回さないでください。ベッドを使用する方がベッドから滑り落ちて、けがをするおそれがあります。

**注意**


- ハンドル操作時は、ベッドの電源プラグがコンセントから抜けていることを確認してください。ハンドルとベッドの手元スイッチを同時に操作すると、ベッドが故障するおそれがあります。
- 各部位の動作が止まったらハンドル操作はしないでください。各部位の動作が止まっている状態でハンドルグリップを回し続けると、アクチュエーターおよびベッドが破損・故障するおそれがあります。
- ハンドル操作でベッドを動作させるときは、各部位の動作範囲内で動作させてください。動作範囲を超えて動作させると、アクチュエーターおよびベッドが破損・変形するおそれがあります。  
 ※動作範囲は、ベッドの取扱説明書を参照してください。

### 1.背ボトムあげ・さげ操作のしかた

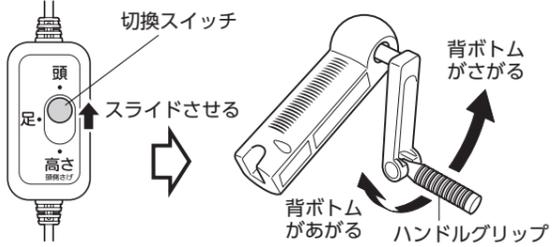- 1 切換スイッチを「頭」位置にスライドさせてください。
  - 2 ハンドルグリップを「時計回り」に回すと背ボトムが上がり、「反時計回り」に回すとさがります。
- 

### 2.膝・足ボトムあげ・さげ操作のしかた

※楽匠フィットシリーズ (Hタイプ)・楽匠プラスシリーズ (Hタイプ/Xタイプ) 背・ひざ・高タイプ・楽匠Zシリーズ 背・ひざ・高タイプ・楽匠FeeZシリーズ・レントシリーズ・KQ-60000シリーズ 3モータータイプ・KQ-B6000シリーズ 3モータータイプ・KA-7900シリーズのみ操作ができます。

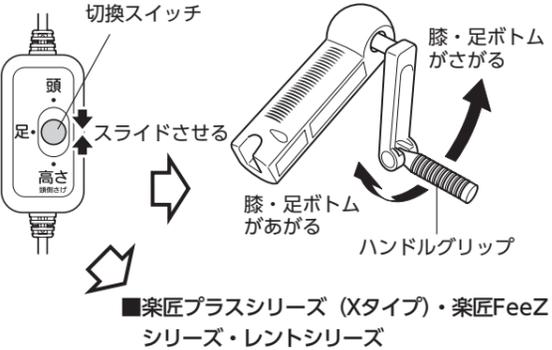- 1 切換スイッチを「足」位置にスライドさせてください。
  - 2 ハンドルグリップを「時計回り」に回すと膝・足ボトムが上がり、「反時計回り」に回すとさがります。
- ※楽匠プラスシリーズ (Xタイプ)・楽匠FeeZシリーズ・レントシリーズは、ハンドルグリップを「時計回り」に回すと膝・足ボトムが上がり、「反時計回り」に回すとさがります。
- 
- 楽匠フィットシリーズ (Hタイプ)・楽匠プラスシリーズ (Hタイプ)・楽匠Zシリーズ・KQ-60000シリーズ・KQ-B6000シリーズ・KA-7900シリーズ
- 楽匠プラスシリーズ (Xタイプ)・楽匠FeeZシリーズ・レントシリーズ

### 3.高さ(頭側さげ)操作のしかた

※楽匠フィットシリーズ (Hタイプ)・楽匠プラスシリーズ (Hタイプ/Xタイプ)・楽匠Zシリーズ・楽匠FeeZシリーズ・レントシリーズ・KQ-60000シリーズ・KQ-B6000シリーズ・KA-7900シリーズのみ操作ができます。(背タイプは除く)  
 ※楽匠プラスシリーズ (Xタイプ)・楽匠FeeZシリーズ・レントシリーズ・KQ-60000シリーズ・KQ-B6000シリーズはベッド全体の高さが変わります。

- 1 切換スイッチを「高さ 頭側さげ」位置にスライドさせてください。
  - 2 ハンドルグリップを「反時計回り」に回すとベッドの高さ(頭側さげ)がさがります。
- 

- 注意**
- ハンドルグリップの回転方向については、ハンドル本体に貼付の「ラベルA」にも記載されています。
  - ハンドルグリップを回転させる速度が遅いと、ベッドが動作しない場合があります。回転速度の目安は、1秒間に2回転(※1)です。
    - ※1) ベッドの動き出しは最も電力を消費するため、1秒間に2回転の回転速度ではベッドが動かない場合があります。ベッドが動かない場合は、動き出しのみ回転速度を速くしてください。
  - ベッド動作には空走(※2)があり、ハンドルグリップを回してもすぐにベッドが動作しない場合があります。
    - ※2) ベッドは動作せず、アクチュエーターのみが動いている状態です。しばらくハンドルグリップを回し続けてください。
  - あげ動作をする場合、使用者体重は80kg(マットレスやオプションなどの付帯物を含まず)以下を目安としてください。80kgを超えるとハンドルグリップが重くなり、操作が困難となります。
  - 使用後はハンドルを収納ケースに入れて保管してください。(10~11ページの「5 ハンドルの片付けかた」参照)


## 5 ハンドルの片付けかた

ベットの電源プラグが抜けていることを確認してください。

### 1.ハンドルグリップの収納

#### 注意


- ハンドルグリップを収納するときは、ハンドル本体とハンドルグリップの間に手や指をはさまないように注意してください。はさまれてけがをします。
- ハンドルグリップは、正しく収納してください。正しく収納されていないとハンドルグリップが落下してゆかを傷つけたり、ハンドルが破損・変形したりするおそれがあります。

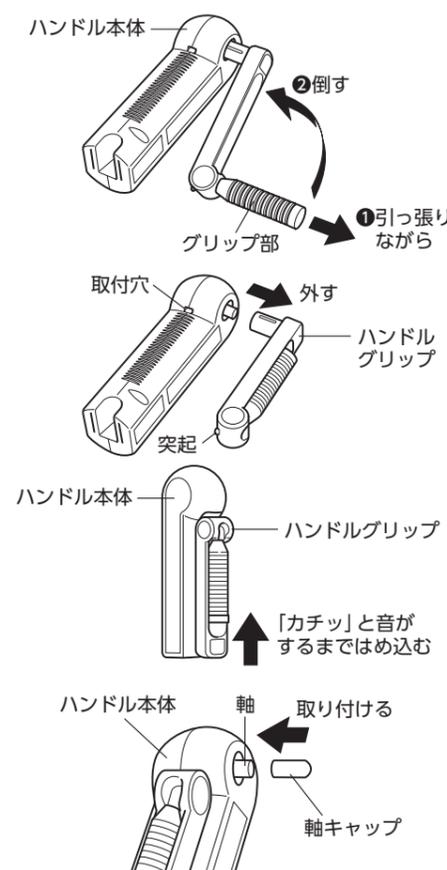- 1 グリップ部を矢印①の方向に引っ張りながら、矢印②の方向に倒してください。
  - 2 ハンドルグリップを矢印方向に取り外してください。
  - 3 ハンドルグリップの突起とハンドル本体の取付穴が合うように、「カチッ」と音がするまで矢印方向にはめ込んでください。
  - 4 ハンドル本体の軸に軸キャップを取り付けてください。
- 

### 2.ハンドルの収納

#### 注意

ハンドル収納後は、収納ケースのフタが確実に閉まっていることを確認してください。ハンドルが落下してゆかを傷つけたり、ハンドルが破損・変形したりするおそれがあります。

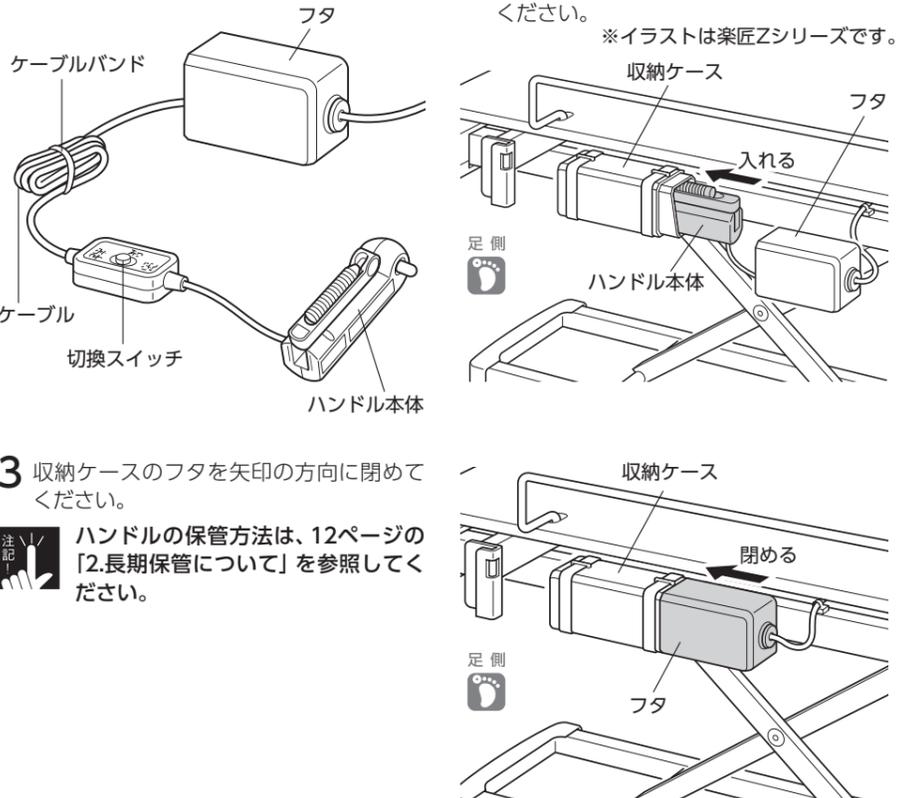- 1 ハンドルのケーブルを、図のようにケーブルバンドで束ねてください。
  - 2 ハンドル本体を収納ケースに入れ、フタに束ねたケーブルと切換スイッチを入れてください。  
※イラストは楽匠Zシリーズです。
  - 3 収納ケースのフタを矢印の方向に閉めてください。
- 
- 注意**
- ハンドルの保管方法は、12ページの「2.長期保管について」を参照してください。

### 3.フットボードの取り付け

ベッドの取扱説明書を参照して、フットボードを元通りに取り付けてください。

# 6 日常のお手入れ・長期保管について

## 1. 日常のお手入れについて

### ハンドルの汚れの落とし方

- ①水で薄めた中性洗剤にひたした布を、よくしぼって拭いてください。
- ②水でひたした布をよくしぼって、残った洗剤分を拭き取ってください。
- ③乾いた布で残った水分を拭き取ってください。

### 消毒のしかた

下記の消毒剤を、指定の濃度、消毒剤の取扱説明書などの指示に従ってご使用ください。

消毒剤	指定の濃度
消毒用エタノール	76.9～81.4%
塩化ベンザルコニウム (オスパンなど)	0.05～0.2%
塩化ベンゼトニウム (ハイアミンなど)	0.05～0.2%
グルコン酸クロルヘキシジン (ヒビテンなど)	0.05%
次亜塩素酸ナトリウム (ミルトンなど)	0.02～0.05%

### 注意

- 揮発性のもの (シンナー、ベンジン、ガソリンなど) やクレゾールは使用しないでください。変色・変質するおそれがあります。



- 消毒剤を使用する場合は、指定以外の薬品を使用しないでください。破損・変質のおそれがあります。
- 中性洗剤を使用した場合は、その後水拭きをしてください。水拭きをしないと樹脂の部分が割れるおそれがあります。

## 2. 長期保管について

- 保管するときは、ハンドルグリップをハンドルグリップ収納部に収納し、ケーブルをケーブルバンドで束ねてください。
- 収納ケースに、取扱説明書・ハンドルを入れて保管してください。
- 高温・多湿・低温・乾燥・ほこりの多い場所を避けてください。温度-10～50℃、湿度30～90% RHの環境で保管してください。
- 1年毎に、点検 (ハンドルグリップの回転・ケーブルの断線の有無など) を行ってください。

### 注意

- ハンドルを落としたり、衝撃を加えたり、ケーブルやコネクタをはさんだりしないでください。ハンドルが破損・変形するおそれがあります。
- 保管するときに、ハンドル本体のケーブルの根元が折れ曲がらないようにしてください。ケーブルの根元が折れ曲がった状態で保管するとケーブルが破損するおそれがあります。

# 7 故障かな?と思ったら

- 故障でない場合がありますので、修理を依頼される前にもう一度、以下の項目をチェックしてください。
- チェック・処置しても正常に動作しない場合は、ただちにハンドルの使用を中止し、販売店またはバラテクノコールセンター (17ページ参照) まで修理をご依頼ください。

状態 (症状)	チェック	処置	参照ページ
ハンドルグリップを回しても、ベッドが動作しない (ベッドからジーと音が鳴る場合があります)	ハンドルグリップの回転速度が遅くありませんか? しばらくハンドルグリップを回し続けると動作しますか? 動作させたい部位が、ベッドの動作範囲外に達していませんか?	ハンドルグリップの回転速度を速くしてください (1秒間に2回転以上)。 アクチュエーターには空走があり、しばらくハンドルグリップを回し続けるとベッドが動き出します。 ハンドルグリップを逆方向に回転させ、ベッドの動作範囲内に戻して使用してください。	7～9 7～9 7～9
ハンドルグリップを回してもベッドが動作しない	ハンドルのコネクタが外れていませんか?	ハンドルのコネクタを差しなおしてください。	15
ハンドル操作が重い	ベッド上の使用者体重が80kg以上ではありませんか?	背ボトム・膝・足ボトムのあげ動作は、使用者体重が80kgを超えるとハンドル操作が重くなり、困難となります。	7～9
操作したい部位と異なる部位が動作する	切換スイッチが操作したい部位になっていませんか?	切換スイッチを操作したい部位に交換してください。	7～9

# 8 仕様

品名		スマートハンドル	
品番	KQ-P70S (QP70S)		
寸法 (cm)	収納ケース	8×9×30	
	ハンドル本体	収納時: 6×8×20、使用時: 18×7×20	
	切換スイッチ	3×4×7	
ケーブル長さ (m)	有効長さ2.3		
製品質量 (kg)	1.2		
適合品	楽匠フィットシリーズ (Hタイプ)・楽匠プラスシリーズ (Hタイプ/Xタイプ) [KQ-A****]・楽匠Zシリーズ [KQ-7****]・楽匠FeeZシリーズ [KQ-77**/KQ-78**]・レントシリーズ [KQ-68****]・KQ-60000シリーズ [KQ-6****]・KQ-B6000シリーズ [KQ-B6****]・KA-7900シリーズ [KA-79**]		
回転数 (※)	さげ	楽匠フィットシリーズ (Hタイプ)・楽匠プラスシリーズ (Hタイプ)・楽匠Zシリーズ・KA-7900シリーズ	頭: 2回転/度、足: 2回転/度、高さ (頭側): 10回転/度 (傾斜)
	あげ	楽匠フィットシリーズ (Hタイプ)・楽匠プラスシリーズ (Hタイプ)・楽匠Zシリーズ・KA-7900シリーズ	頭: 2回転/度、足: 2回転/度、高さ: 7回転/cm
回転数 (※)	さげ	楽匠フィットシリーズ (Hタイプ)・楽匠プラスシリーズ (Hタイプ)・楽匠Zシリーズ・KA-7900シリーズ	頭: 3回転/度、足: 3回転/度
	あげ	楽匠プラスシリーズ (Xタイプ)・楽匠FeeZシリーズ・レントシリーズ・KQ-60000シリーズ・KQ-B6000シリーズ	頭: 3回転/度、足: 2回転/度

※) 1秒間に2回転でフルストローク動作させた場合の平均。(使用者体重60kgの場合)  
下記使用条件により、回転数が変化します。  
・使用者体重  
・背筋運動動作をする場合、しない場合  
・ボトム角度  
・マットレスやオプションなどの付帯物の荷重


# 9 収納ケースの取り付けかた・取り外しかた

### 注意

- 収納ケースは正しく取り付けてください。間違った取り付けかたで使用すると収納ケースやハンドルが破損・変形するおそれがあります。
- 収納ケースの取り付け後、ベッドの足ボトムやフットボードが収納ケースと接触していないことを確認してください。接触していると収納ケースが外れて落下し、ゆかを傷つけたり、収納ケースおよびハンドルが破損・変形したりするおそれがあります。
- 楽匠プラスシリーズ (Xタイプ)・楽匠FeeZシリーズ・レントシリーズ・KA-7900シリーズは、収納ケースをベッドのフレームに取り付けしないでください。収納ケース・ハンドルが破損・変形するおそれがあります。

## 1. 収納ケースの取り付けかた

※イラストは楽匠Zシリーズです。

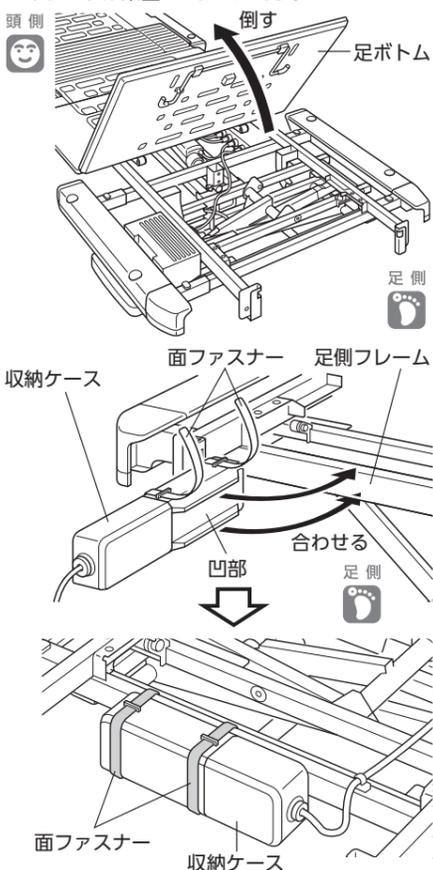


**注意** 楽匠プラスシリーズ (Xタイプ)・楽匠FeeZシリーズ・レントシリーズ・KA-7900シリーズは、収納ケースをベッドのフレームに取り付けることができません。ハンドルを使用されるときに15ページ「6・7・8」の方法で、ハンドルをコントロールボックスに取り付けてください。

- 1 ベッドの電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 2 ベッドの取扱説明書を参照して、ベッドのフットボードを取り外してください。
- 3 ■楽匠フィットシリーズ (Hタイプ)・楽匠プラスシリーズ (Hタイプ)・楽匠Zシリーズ  
ベッドの足ボトムを持ち上げ、頭側に倒してください。  
■KQ-60000シリーズ・KQ-B6000シリーズ  
ベッドの取扱説明書を参照して、膝・足ボトムを取り外してください。
- 4 収納ケース凹部を足側フレームに合わせ、面ファスナーで収納ケースをしっかりと固定してください。


**注意** 面ファスナーは面と面がずれないように、全面をしっかりと貼り合わせてください。

## 9 収納ケースの取り付けかた・取り外しかた


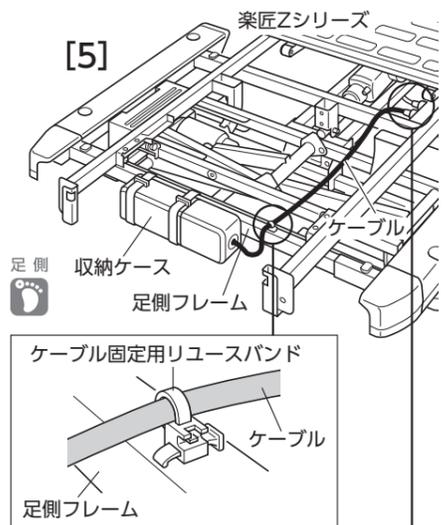


**5** ■楽匠フィットシリーズ (Hタイプ)・楽匠プラスシリーズ (Hタイプ)・楽匠Zシリーズ  
ケーブルを左図のように配線し、ケーブルに付いているケーブル固定用リユースバンドをベッドの足側フレームの穴に固定してください。

■KQ-60000シリーズ  
ケーブルを下図のように配線してください。

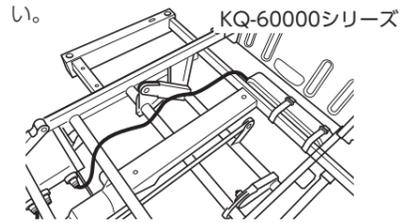

■KQ-B6000シリーズ  
ケーブルを下図のように配線してください。

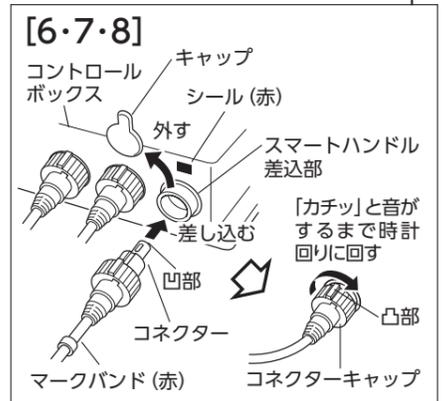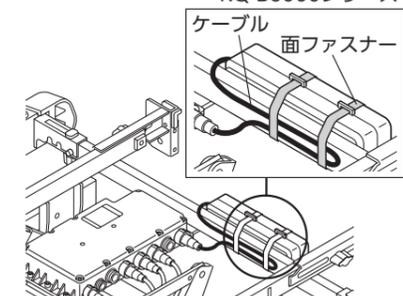

**6** ベッドのコントロールボックスのスマートハンドル差込部 (赤色) のキャップを取り外してください。

**注意** 取り外したキャップは紛失しないように、収納ケースに入れて保管してください。


**7** ハンドルのコネクタを、ベッドのコントロールボックスの差込部 (赤色) に差し込んでください。

**8** コネクタキャップを「カチッ」と音がするまで時計回りに回してください。

9 14ページ「3」と逆の手順でベッドの足ボトムまたは膝・足ボトムを、元の状態に戻してください。

10 ベッドの取扱説明書を参照して、フットボードを元通りに取り付けてください。

## 2. 収納ケースの取り外しかた

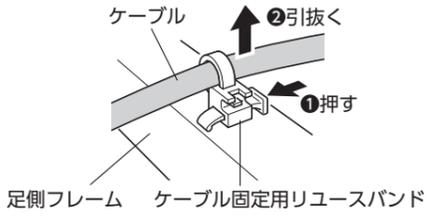

収納ケースの取り外しは、取り付けと逆の手順で行ってください。ケーブル固定用リユースバンドは、左図の要領で足側フレームから外してください。

**注記** 収納ケースの取り付けかたの「6」で外したキャップは、コントロールボックスの保護のために、必ず元通りに取り付けてください。

# アフターサービスについて

## 1. 保証書について

保証書は、必ず「販売店名・お買い上げ日」などの記入をお確かめになり、記載内容をよくお読みいただき大切に保管してください。保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

販売店名・お買い上げ日の記入がない場合は、品番・販売店名・お買い上げ日が確認できるように、製品をお買い上げの領収書などを保証書と一緒に保管してください。

## 2. 修理を依頼されるとき

修理のご依頼は、お買い上げの販売店または弊社製品の修理受付窓口であるパラテクノロジーセンター（右記参照）までご連絡ください。

### 連絡していただきたい内容

- 品名、品番、製品識別表示ラベルの番号（ラベルの貼付位置は1ページ参照）
- お買い上げ日
- 故障または異常の内容（できるだけ詳しく）
- お名前、ご住所および電話番号

### 保証期間中は

保証書の記載内容に基づき無償で修理いたします。ただし、保証期間内でも修理が有償になる場合があります。詳しくは下記の保証書をご覧ください。

### 保証期間が過ぎているとき

修理により使用できる製品については、ご希望により有償で修理いたします。

## 3. 部品の最低保有年数は

弊社ではこの製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）の最低保有期間を製造打ち切り後5年としております。

## 4. アフターサービスについてご不明な場合

お買い上げの販売店、またはパラテクノロジーセンターまでお問い合わせください。

**パラテクノロジーセンター**  
 フリーダイヤル **0120-54-8639**  
 受付時間：平日 8:00～18:00 /  
 土・日・祝日 9:00～17:00  
 （年始は休業いたします）

## 保証書

品名/品番	スマートハンドル/KQ-P70S(QP70S)	保証期間	*お買い上げ日	年	月	日より1年間
お客様	お名前 〒 ( ) ご住所	*販売店 (店名・住所)				

★印欄の情報が確認できない場合は無効となりますので販売店から発行された★印欄の情報が確認できる領収書などを、本保証書と一緒に大切に保管してください。この保証書は、本書の記載内容に基づき無償修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から上記保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書きに従った正しい使用状態で故障した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。  
 ※本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

### 【保証規定】

- 保証期間内（お買い上げの日より1年間）に、正常なご使用状態において故障した場合は、無償で修理いたします。
  - 次のような場合は、保証期間内でも修理は有償となります。
    - 使用上の誤り、あるいは不当な改造や修理による故障および損傷
    - 弊社が指定する適合品以外の製品と組み合わせて使用したことによる故障および損傷
    - お買い上げ後の移動、設置、落下あるいは輸送による故障および損傷
  - 火災、煙害、異常電圧および地震、雷、風水害、その他、天災地変などによる故障および損傷
  - 保証書のご提示がない場合
  - 本保証書の保証期間および販売店名が確認できない場合
  - 字句を書き換えるなどの不正行為が発覚した場合
3. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。  
 ● This warranty is valid only in Japan.

### <パラマウントベッド 株式会社>

本社	〒136-8670	東京都江東区東砂2丁目14番5号	☎(03)3648-1111 (代)
東京支店	〒136-8670	東京都江東区東砂2丁目14番5号	☎(03)3648-1171 (代)
札幌支店	〒060-0062	札幌市中央区南2条西13丁目3番地11	☎(011)271-1181 (代)
仙台支店	〒984-0015	仙台市若林区卸町2丁目3番地の3	☎(022)239-5211 (代)
さいたま支店	〒336-0967	さいたま市緑区美園3丁目2番1	☎(048)878-0100 (代)
横浜支店	〒194-0004	東京都町田市鶴間5丁目3番33号	☎(042)795-8800 (代)
名古屋支店	〒461-0001	名古屋市東区泉1丁目20番17号	☎(052)963-0600 (代)
大阪支店	〒550-0001	大阪市西区土佐堀2丁目3番33号	☎(06)6443-8791 (代)
高松営業所	〒761-8031	高松市郷東町2番1	☎(087)881-8900 (代)
広島支店	〒733-0011	広島市西区横川町3丁目8番5号	☎(082)293-1311 (代)
福岡支店	〒812-0013	福岡市博多区博多駅東3丁目14番20号	☎(092)461-1131 (代)

# メモ

