

ストレッチャーを安全にご利用いただくために

平素はパラマウントベッド製品をご利用いただき、厚く御礼申し上げます。


弊社製ストレッチャーをより安全にご使用いただくために、製品情報をご案内させていただきます。

■患者さんの転落予防について

弊社製ストレッチャーは、患者さんの転落予防のために「患者固定ベルト」および「サイドレール（機種によってはトランスファーボード）」を従来から標準仕様としています。

患者さんをストレッチャーに乗せている間は次の事項をお守りください。


①患者固定ベルトで患者さんの身体を固定し、②サイドレール（機種によってはトランスファーボード）を上げ、③サイドレールのストッパーがかかっていることを確認して下さい。

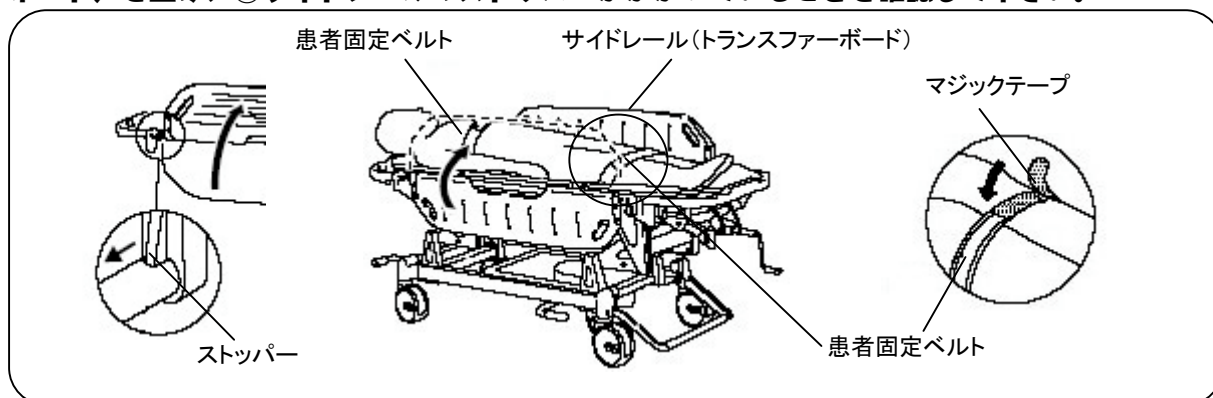

■セーフティーロック機構の追加について

ストレッチャーをより安全にご使用頂くため、最新の製品よりサイドレール（機種によってはトランスファーボード）にセーフティーロック機構を追加し、標準仕様としました。

セーフティーロック機構は、サイドレールのスライド動作を制限して不意のストッパー解除を予防するものです。

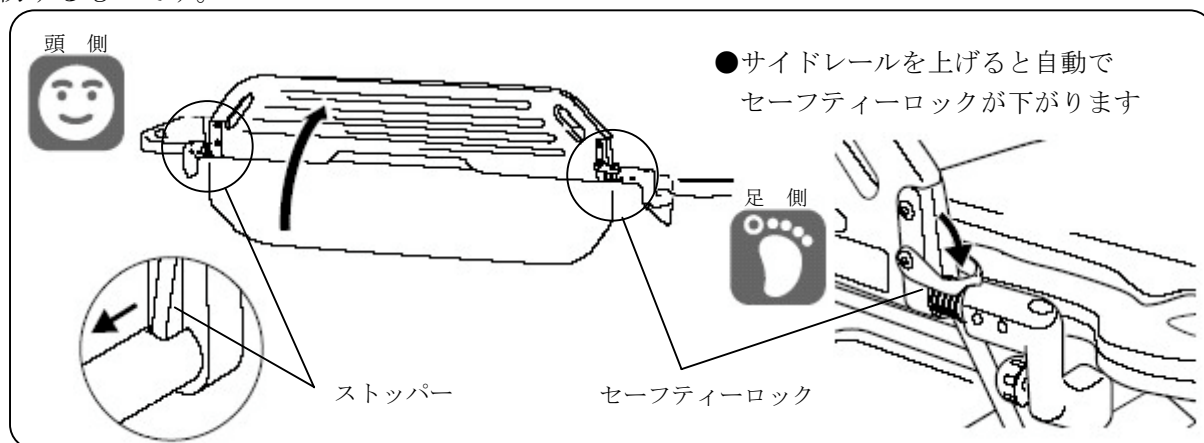

■セーフティーロック機構についてのお問合せ

セーフティーロック機構は、最新の製品に装着されています。

ご使用中のストレッチャーにも追加することが可能です。（一部適用できない機種があります）

セーフティーロック機能追加に関するご質問などは、下記フリーダイヤルまでお問合せください。

TEL：0120-54-8639

…パラテクノ株式会社（修理受付）が承ります。

受付時間 9：00～17：00（土・日・祝日を除く）